

## Gruszka, z kanką nr 5 (Kej)

Cena: 7,77 zł



### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	gruszka
Producent	PPHU KEJ SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

### Opis produktu

#### Opis

**Gruszka z kanką** to wyrób medyczny stosowany doodbytniczo u dzieci i dorosłych, wspomagający łagodzenie zaparć, kolek oraz przygotowanie do zabiegów w obrębie jamy brzusznej. Produkt posiada certyfikat CE, został wykonany z troską o środowisko i cechuje się solidnym wykończeniem.

#### Sposób użycia

Przed każdym użyciem gruszki z kanką do wykonania lewatywy, jak i po jej zakończeniu, należy starannie ją umyć w ciepłej wodzie z mydłem, oddzielając kankę od gruszki. Wmyte części wygotować w wodzie przez 10 minut. Następnie zamontować kankę, wkładając jej krótszy koniec do otworu gruszki, a do oparcia się kołnierza kanki o krawędź gruszki. Napełnić gruszkę rumiankiem, roztworem soli fizjologicznej lub innym roztworem zaleconym przez lekarza. Zastosowana ciecz powinna mieć temperaturę od 32°C do 34°C. Kankę posmarować cienką warstwą wazeliny kosmetycznej powoli wprowadzić do odbytu bez wywierania ucisku. Po czym nacisnąć gruszkę w taki sposób, aby opróżnić jej zawartość do jelita. Po wykonaniu tej czynności ścisnąć pośladki i wyjąć kankę z odbytu. Dla zapobieżenia wycieku wprowadzonego płynu należy jeszcze przez kilka minut trzymać ściśnięte pośladki.

#### Producent

PPHU KEJ Sp. z o.o.  
Cikowice 241  
32-700 Bochnia