

Gruszka, z miękką końcówką nr 2 (Kej)

Cena: 7,57 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	gruszka
Producent	PPHU KEJ SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gruszka z miękką końcówką

- wyrób medyczny
- rozmiar 2, zalecany dla dzieci
- pojemność: 24 ml

Wskazania

Gruszka z miękkim końcem przeznaczona jest do łagodzenia objawów przeziębień, zapobiegania infekcjom górnych dróg oddechowych poprzez usuwanie wydzieliny kataralnej z nosa oraz zapobiegania podrażnieniom i stanom zapalnym uszu, dzięki usuwaniu za ich pomocą wody i woskowiny z uszu.

Sposób użycia

- Miękką końcówkę gruszki należy bardzo delikatnie wsunąć w otwory anatomiczne nosa lub uszu i wykonać czynności udrażniającą, czyszczącą poprzez zassanie.
- Przed i po użyciu gruszkę umyć w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie wygotować w wodzie przez 10 minut.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- Gruszka z miękkim końcem jest wyrobem indywidualnego użytku.
- Wszelkie czynności związane z zastosowaniem gruszek z miękkim końcem powinny wykonywać osoby dorosłe.

Producent

KEJ
Sygneczów 1



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Wieliczka