

Hartmann Grassolind opatrunek jałowy z maścią 10x20cm, 30 sztuk



Cena: 161,28 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 sztuki
Postać	Opatrunek
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Grassolind Neutral – opatrunek siatkowy z maścią, jałowy

Skład

Siatka tiulowa o dużych oczkach z czystej bawełny, impregnowana maścią niezawierającą wody, w skład której wchodzi: biała wazelina, diglycerolester kwasów tłuszczowych jednokarboksylowych i dwukarboksylowych, воск mikrokrystaliczny węglowodorowy.

Zastosowanie

Polecany dla ran silnie sączących jako opatrunek pierwotny. Przepuszcza do opatrunku wtórnego również lepłą wydzielinę. Można go stosować we wszystkich fazach gojenia.

Zalecany zwłaszcza w przypadkach gdy zależy nam na utrzymaniu miękkich i elastycznych powierzchni rany i brzegów, np. do rozległych ran i skaleczeń skóry, a także w przypadku oparzeń, do stosowania w chirurgii plastycznej i kosmetycznej, w ekstrakcjach paznokci, do pokrywania miejsca pobrania skóry do przeszczepu oraz do mocowania przeszczepów skóry; nadaje się również w dermatologii, szczególnie wskazany w leczeniu pacjentów ze skórą wrażliwą.

Sposób użycia

Wyjąć opatrunek z oboma nakładkami osłaniającymi z opakowania jednostkowego i w razie potrzeby przyciąć odpowiednio do wielkości rany. Usunąć nakładkę osłaniającą z jednej strony opatrunku i położyć go na ranie, po czym usunąć drugą nakładkę osłaniającą. W celu odprowadzenia wydzieliny z rany umocować ponad opatrunkiem z maścią jałowy opatrunek chłonny. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zmieniać przy każdej zmianie opatrunku.

Właściwości

Grassolind neutral to opatrunek wykonany z siatki tiulowej o dużych oczkach z czystej bawełny, impregnowanej maścią nie zawierającą wody. Siatka tiulowa o dużych oczkach umożliwia łatwy odpływ wydzieliny, z kolei maść zapewnia elastyczność brzegów rany, sprzyjając tworzeniu się tkanki ziarninowej, wspomagając proces epitelizacji i zapobiegając przyklejaniu się opatrunku do rany. Zmiana

opatrunku jest bezbolesna i nie powoduje podrażnienia tkanki ziarninowej i warstwy młodego nabłonka.

Ostrzeżenia

- Zawartość jałowa, dopóki opakowanie jednostkowe nie uległo zniszczeniu.
- Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji leżącej, w temperaturze poniżej 40 stopni Celsjusza.
- Opatrunku nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Producent

HARTMANN

Galeria

