

# HelicobacterPylori Test Diago-HP

Cena: 24,01 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                   |
| Opakowanie      | 1 zestaw                                   |
| Postać          | test                                       |
| Producent       | DIAGNOSIS S.A.                             |
| Przeznaczenie   | Diagnostyczne                              |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                             |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

Test diagnostyczny na Helicobacter pylori to medyczne urządzenie służące do wykrywania obecności przeciwciał charakterystycznych dla bakterii Helicobacter pylori w próbce krwi. Zaprojektowany z myślą o użytkowaniu domowym, test cechuje się wysoką precyzją, czułością oraz łatwością obsługi. Wynik można odczytać już po 15 minutach od wykonania badania. Skuteczność testu przekracza 98%, co czyni go niezawodnym narzędziem w diagnostyce zakażenia.

### Wskazania

Test na Helicobacter Pylori jest wstępnym etapem diagnostyki schorzeń układu pokarmowego. Wykrywa specyficzne przeciwciała wytworzone w organizmie człowieka w odpowiedzi na zakażenie bakterią H. pylori.

Helicobacter pylori (H. pylori) jest bakterią bytującą w błonie śluzowej żołądka, mogącą pozostawać w żołądku do końca życia pacjenta. Do zakażenia bakterią H. pylori dochodzi zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie. Najczęściej przebiega bezobjawowo, lecz może być przyczyną rozwoju stanów zapalnych żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a nawet raka żołądka.

### Przeznaczenie

HelicobacterPylori Test Diago-HP wykrywa specyficzne przeciwciała wytworzone w organizmie człowieka w odpowiedzi na zakażenie bakterią H. pylori. Poziom wykrywalności tych przeciwciał w wyrobie wynosi 18 mIU/ml. Jeżeli przeciwciała są obecne w organizmie to wynik testu będzie pozytywny. Badania kliniczne prowadzone przy użyciu testu wykazały dokładność na poziomie ponad 98% oraz czułość testu na poziomie ponad 96%.

### Sposób użycia

1. Umyj ręce. Rozerwij opakowanie, wyjmij test i pipetę.
2. Zdezynfekuj palec, z którego będzie pobierana krew, wacikiem nasączonym alkoholem dołączonym do opakowania.
3. Nakłuj palec jałową igłą automatyczną.
4. Zbliź końcówkę pipety do kropli krwi. Pod wpływem sił kapilarnych krew zacznie sama wpływać do pipety. Wypełnij pipetę do zaznaczonej linii.
5. Nanieś próbkę krwi do zagłębienia oznaczonego „S”.
6. Po wprowadzeniu krwi do zagłębienia odczekaj 90 sekund.



7. Odkręć nakrętkę pojemnika z roztworem testowym. Powoli wprowadź 5 kropli roztworu do wgłębienia na bufor, zaznaczonego na teście „D”.
8. Odczytaj wynik testu dokładnie w 15 minucie.

#### **Przeciwwskazania**

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w ulotce.

#### **Uwagi**

Tak jak w przypadku wszystkich testów do samodzielnego wykonania, ostateczna diagnoza nie powinna zostać oparta o wynik pojedynczego testu. Diagnoza powinna zostać postawiona przez lekarza po dokonaniu oceny wszystkich badań klinicznych i laboratoryjnych.

#### **Producent**

BIOMERICA INC.