


# Help4Skin Gojenie Oparzeń, żel hydrokoloidowy, 75 g

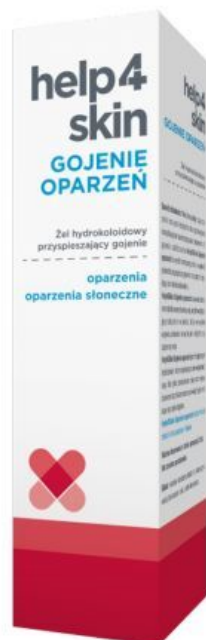

Cena: 50,22 zł

## Opis słownikowy

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                             |
| Marka           | HELP 4 SKIN                                                       |
| Opakowanie      | 75 g                                                              |
| Postać          | Żel                                                               |
| Producent       | ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.                               |
| Przeznaczenie   | Obrzęk, Oparzenie, Otarcia, Rana, Skaleczenie                     |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                                                    |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat |

## Opis produktu

### Opis

Help4Skin Gojenie oparzeń, żel hydrokoloidowy, 75 g wyrób medyczny reguluje poziom wilgotności rany.

### Wskazania

Help4Skin Gojenie oparzeń może być stosowany na powierzchniowe oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami.

- Oparzenia.
- Oparzenia słoneczne.
- Otarcia i pęknięcia skóry.

### Działanie

Help4Skin Gojenie oparzeń to hydrokoloidowy żel o udowodnionej skuteczności.

- Natychmiastowo zmniejsza ból.
- Zapewnia efekt chłodzenia.
- Przyspiesza gojenie.
- Pomaga uniknąć infekcji.
- Tworzy barierę ochronną.
- Zmniejsza ryzyko powstawania blizn i strupów.

### Skład

Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

### Sposób użycia

Powierzchowne oparzenia:

- natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii nie zaleca się stosowania zimnej wody.
- raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać.
- jeśli to konieczne stosować opatrunek.

Oparzenia słoneczne:

- oczyścić oparzone miejsce,
- raz lub dwa razy dziennie aplikować cienką warstwę preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę nie dotykając jej dozownikiem. Nie wcierać.

jeśli to konieczne stosować opatrunek.

Drobne rany:

- oczyścić i zdezynfekować ranę,
- jeśli to konieczne ostrożnie osuszyć sterylną gazą,
- raz lub dwa razy dziennie aplikować cienką warstwę preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę nie dotykając jej dozownikiem. Nie wcierać.
- jeśli to konieczne stosować opatrunek.

### Ostrzeżenia

- Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).
- Nie należy stosować na duże otarcia (większe niż 20 cm<sup>2</sup>).
- Nie stosować na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.
- Przechowywać w temperaturze między 5°C a 25°C.
- Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Chronić od światła i wilgoci.

### Producent

OYSTERSHELL

## Galeria



**help4 skin**   
GOJENIE OPARZEN

**Przyspiesza gojenie:**  powyżej 2 roku życia

-  Oparzeń
-  Oparzeń słonecznych

**natychmiastowo chłodziąc i kojąc oparzone miejsca.**

**help4 skin**   
GOJENIE OPARZEN

-  Natychmiastowo zmniejsza ból
-  Zapewnia efekt chłodzenia
-  Tworzy barierę ochronną

**help4 skin**   
GOJENIE OPARZEN

**Butelka AIRLESS z aplikatorem** pozwala na łagodną formę aplikacji przy bolesnych oparzeniach.



**help4 skin**   
GOJENIE OPARZEN

**ŚREDNIA OCENA UŻYTKOWNIKÓW CENEO.PL\***

**4,8/5**

- + Skuteczność
- + Szybkość działania
- + Wydajność

\*Ocena z 22 opinii dostępnych w serwisie Ceneo.pl, stan na dzień 23.06.2022.  
Zobacz: <https://www.ceneo.pl/13333814840-14840-14840>

**help4 skin**   
GOJENIE OPARZEN

**POZNAJ SERIĘ PRODUKTÓW**

**GOJENIE RAN** **GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY**

