

Herbal Medica Orelon NaturSpray do Uszu, dla dorosłych i dzieci po 3 miesiącu, 15 ml



Cena: 18,98 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 ml
Postać	Aerozol
Producent	HERBAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Oczyszczające, Odświeżające, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Herbal Medica Orelon NaturSpray do Uszu to medyczny preparat w formie sprayu, stworzony na bazie oliwy z oliwek z dodatkiem olejku miętowego. Jego bezpieczna i efektywna formuła, oparta na dwóch naturalnych składnikach, wspiera codzienną higienę uszu oraz pomaga zapobiegać gromadzeniu się wody w przewodzie słuchowym. Produkt może być stosowany zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci oraz niemowlęta od 3. miesiąca życia.

Składniki

Oliwa z oliwek, olejek miętowy.

Zastosowanie

- Rozpuszczanie i usuwanie złożeń woskowiny usznej, które mogą prowadzić do powstawania korków woskowinowych i pogorszenia słuchu.
- Usuwanie zalegającej wody w kanale ucha.
- Nawilżanie błony śluzowej przewodu słuchowego.

Sposób użycia

- Dzieci powyżej 3 miesiąca życia i dorośli: 1-2 naciśnięcia aplikatora do każdego otworu słuchowego.
- Przed pierwszym użyciem opakowania Orelon NaturSpray należy wstrząsnąć buteleczkę, a następnie wprowadzić w pionowej pozycji aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i nacisnąć kilka razy, aż pojawi się płyn.
- Zaaplikować odpowiednią dawkę wyrobu (1-2 naciśnięcia) i delikatnie rozmasować zewnętrzną część ucha.
- Powtórzyć tę samą czynność w drugim uchu.

- Po użyciu wyrobu końcówkę aplikatora należy umyć pod bieżącą wodą.
- Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.
- W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu Herbal Medica Orelon NaturSpray do Uszu, spray, 15 ml.
- Nie stosować u osób z perforacją błony bębenkowej.
- Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej.
- Nie stosować u wcześniaków.

Właściwości

Oliwa z oliwek po aplikacji do ucha rozpuszcza zalegającą wydzielinę i przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych. Składnik ten dba również o nawilżenie kanału słuchowego. Natomiast olejek miętowy posiada właściwości odświeżające. Dodatkowo ogrzewa ucho, zapewniając przyjemne odczucia podczas użytkowania. Składniki wyrobu medycznego wykazują przy tym działanie przeciwzapalne, chroniące przed powstawaniem stanów zapalnych ucha. Spray do uszu Orelon NaturSpray nie zawiera dodatku sztucznych substancji, w tym barwników i konserwantów.

Orelon NaturSpray zapewnia bezinwazyjną i skuteczną pielęgnację uszu. Włączenie preparatu marki Herbal Medica do regularnej higieny przewodu słuchowego chroni przed zaleganiem woskowiny usznej oraz nawilża błonę śluzową przewodu słuchowego. Właściwie wyprofilowany aplikator pozwala na bezpieczne i łatwe dozowanie, a także umożliwia równomierne rozprowadzenie preparatu, co wpływa na jego szybkie działanie. Dzięki precyzyjnie dobranym dawkom Orelon NaturSpray jest bardzo wydajny.

Formuła w sprayu Herbal Medica Orelon NaturSpray do Uszu sprawdzi się, jako wspomaganie higieny uszu u osób noszących aparaty słuchowe, jak również u osób z nadprodukcją woskowiny. Dzięki odpowiedniej konsystencji spray eliminuje zaleganie wody w kanale ucha. Z tego powodu jest zalecany osobom uprawiającym sporty wodne.

Ważne wskazówki

- U niemowląt i małych dzieci wyrób medyczny może być stosowany po konsultacji z lekarzem.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego użycia.

Producent

Herbal Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Rynek Główny 28
31-010 Kraków