

Hexagyn Żel dopochwowy, 40 ml



Cena: 31,80 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	HEXAGYN
Opakowanie	40 ml
Postać	Żel
Producent	HEXANOVA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżanie okolic intymnych
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hexagyn Żel dopochwowy to medyczny środek nawilżający, który przeciwdziała suchości sromu i pochwy oraz łagodzi związany z nią dyskomfort. Przywraca naturalną jędrność i elastyczność intymnym obszarom.

Wskazania

Żel dopochwowy Hexagyn jest wskazany w:

- leczeniu suchości w okolicach sromowo-pochwowych, bez względu na przyczynę (stres, menopauza) - działanie nawilżające
- leczenie bólu przy stosunku płciowym (dyspareunia) - działanie lubrykacyjne
- leczenie podrażnionej śluzówki lub w leczeniu pozabiegowym - działanie odbudowujące

Działanie

- Kwas hialuronowy to substancja odpowiadająca za utrzymanie prawidłowego nawilżenia tkanek, odgrywająca rolę w procesach odbudowy.
- Składnik liposomowo-fosfolipidowy wzmacnia właściwości powlekające i ochronne żelu oraz umożliwia kontrolowane uwalnianie kwasu hialuronowego do śluzówki sromowo-pochwowej, zapewniając jej długotrwałą elastyczność. Opatentowany składnik, na bazie ceramidów trehalozy i lecytyny w pełni odbudowuje fizjologiczny płaszcz hydrolipidowy, poprawiając strukturę bariery ochronnej skóry i zapewniając fizjologiczny poziom nawilżenia.
- Witamina E działa synergicznie z kwasem hialuronowym, zwiększając elastyczność tkanek i spowalniając proces ich starzenia w strefie sromowo-pochwowej.

Składniki

Sól sodowa kwasu hialuronowego, Fosfolipidy, Octan witaminy E, Trehaloza, Cerami NS, Lecytyna uwodorniona, Substancje żelujące i stabilizujące, Woda oczyszczona - q.s. do 100.



Sposób użycia

- Jako środek nawilżająco-odbudowujący: stosować wewnętrznie 2 do 3 razy w tygodniu, aż do ustąpienia objawów. Jeśli to konieczne, niewielką ilość można nałożyć zewnętrznie
- Jako lubrykant - stosować jednorazowo, w chwili stosunku płciowego lub tuż przed nim. Można stosować wraz z prezerwatywą

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować na rany.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Unikać kontaktu z oczami i okolicami oczu. Żel może powodować ich podrażnienie. W sytuacji przypadkowego kontaktu przepłukiwać miejsce obficie wodą, przez kilka minut.
- Unikać przypadkowego stosowania.
- Dokładnie zakręcić tubę po użyciu.
- Produkt nie jest środkiem antykoncepcyjnym.
- Produkt jest kompatybilny z kauczukiem naturalnym, stosowanym w lateksowych prezerwatywach.
- Unikać stosowania przez okres dłuższy niż 30 dni.

Producent

Alma s.r.l.
Via A. Bertani 6
20154 Mediolan, Włochy