

Home Check Test na infekcje intymne pochwy, panelowy, 1 sztuka



Cena: 15,70 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	Home Check
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	MILAPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Home Check Test na infekcje intymne to medyczny produkt przeznaczony do użytku domowego, który pozwala na sprawdzenie poziomu pH w próbce pobranej z pochwy. Dzięki niemu możliwa jest szybka i prosta diagnostyka infekcji układu płciowego u kobiet. Test charakteryzuje się łatwą obsługą, a wynik można odczytać praktycznie natychmiast.

Wskazania

Zaleca się wykonanie badania jeśli u pacjentki występują: pieczenie i świąd okolic intymnych, pieczenie podczas oddawania moczu oraz podczas antybiotykoterapii.

Działanie

Zasada działania wyrobu medycznego związana jest ze wskaźnikiem pH, który jest używany do określania tej wartości w próbce wymazu z pochwy. W trakcie nanoszenia próbki i zetknięcia się wymazówki z papierkiem wskaźnikowym pH, umieszczonym na panelu testowym, zachodzi zmiana w kolorze papierka. Każda wartość pH powoduje różne stopnie i odcienie koloru.

Przeznaczenie

Wyrób medyczny, Home Check Test na infekcje intymne pozwala wykryć nieprawidłową kwasowość wydzieliny z pochwy, a tym samym zdiagnozować bakteryjne zapalenie pochwy (waginozę bakteryjną).

Sposób użycia

- Przed wykonaniem testu należy umyć dokładnie dłonie.
- Otworzyć saszetkę z wymazówką.
- Rozdzielić wargi sromowe i odsłonić ujście pochwy.
- Włożyć delikatnie wymazówkę do pochwy, a następnie docisnąć wacik do punktu, gdy około 5 centymetrów wacika znajdzie się



w pochwie przez około 10 sekund.

- Wyciągnąć wymazówkę w celu wykonania testu.
- Wyjąć kasetkę testową z saszetki. Należy pamiętać, że po jej otwarciu test można wykonać w przeciągu godziny.
- Przyłożyć główkę wymazówki do obszaru pH kasetki testowej co najmniej 5 razy.
- Odczytać wynik natychmiast, gdy strefa pomiarowa jest jeszcze wilgotna. Porównać kolor z obszaru pomiaru pH ze skalą kolorów na saszetce foliowej.

Przeciwwskazania

- Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z informacją zawartą w ulotce dołączonej do opakowania.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Produkt jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie

Ostrzeżenia

- Nie stosować przed upływem 72 godzin od zastosowania preparatów dopochwowych.
- Nie stosować przed upływem 48 godzin od stosunku płciowego.
- Nie stosować przed upływem 5 dni od zakończenia miesiączki.

Uwagi

- Niektóre okoliczności (menstruacja, menopauza, stosunek płciowy, stosowane produkty dopochwowe) mogą tymczasowo zmienić poziom pH pochwy a co za tym idzie – prowadzić do uzyskania fałszywych wyników.
- Nie zaleca się mycia ani brania prysznica przed wykonaniem testu.
- Nie należy rozpoczynać żadnego leczenia przed omówieniem wyniku z lekarzem.

Producent

HANGZHOU AllTest Biotech Co. Ltd
550 Yinhai Street
Hangzhou, China