

Hyabak 0,15%, krople do oczu i soczewek kontaktowych, nawilżające, 10 ml

Cena: 44,57 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hyabak 0,15% to medyczne krople do oczu o działaniu nawilżającym. Przynoszą ukojenie i poprawiają komfort przy zmęczeniu oraz pieczeniu oczu. Pomagają ograniczyć nadmierne łzawienie oraz łagodzą dolegliwości takie jak uczucie obecności piasku czy ciała obcego pod powiekami.

Skład

Hialuronian sodu, chlorek sodu, aktinokinol, trometamol, kwas chlorowodorowy, woda do wstrzykiwań.

Przeznaczenie

Krople Hyabak są przeznaczone do stosowania celem nawilżenia w przypadku odczuwania suchości bądź zmęczenia narządu wzroku, które są spowodowane takimi czynnikami jak:

- wiatr,
- dym,
- zanieczyszczenia,
- przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach,
- przebywanie w miejscach suchych i ciepłych,
- częste latanie samolotami,
- długa praca przed monitorem komputerowym.

Sposób użycia

Dorośli: 1 kroplę produktu wprowadzać do każdego oka w zależności od potrzeby. Można nanosić produkt na soczewkę kontaktową podczas jej zakładania lub zdejmowania jak również w trakcie jej noszenia tak często jak to niezbędne.

Przeciwwskazania



Podanie wyłącznie do oczu. Nie wstrzykiwać, nie połykać. Z powodu braku wystarczających danych nie należy stosować produktu HYABAK® u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia, chyba że zaleci to lekarz. Ze względu na brak wystarczających danych produkt HYABAK® nie powinien być stosowany u dzieci, chyba że zaleci to lekarz. Przed zastosowaniem należy dokładnie umyć ręce. Nie używać żadnych narzędzi do otwierania butelki. Po zastosowaniu należy zamknąć butelkę nakrętką. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po zastosowaniu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli widzenie jest niewyraźne. Należy poczekać kilka minut do czasu, aż powróci normalne widzenie. Należy odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy zastosowaniem dwóch różnych produktów do oczu. Nie należy rozcieńczać produktu HYABAK®, ani mieszać go z innymi roztworami. Po pierwszym użyciu, w przypadku narażenia na niskie ciśnienie atmosferyczne, płyn może wypływać z butelki.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Nie dotykać końcówką zakraplacza do powierzchni oka.
- Produkt tylko do użytku zewnętrznego. Nie wstrzykiwać, nie połykać.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- W przypadku stosowania kilku preparatów okulistycznych należy zachować co najmniej 10 minut przerwy pomiędzy zakraplaniem kolejnych preparatów.
- Zużyć w ciągu 36 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i wilgoci, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent

Laboratoires Théa.
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Francja