

Hyabak UD, 0,15%, krople do oczu, 30 pojemników jednodawkowych x 0,4 ml



Cena: 46,84 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 pojemników po 0,4 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające, Osłaniające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hyabak UD to medyczne krople do oczu i soczewek kontaktowych, pozbawione konserwantów. Zawierają hialuronian sodu, który intensywnie nawilża, oraz specjalny filtr UV chroniący oczy. Preparat skutecznie łagodzi objawy takie jak nadmierne łzawienie, uczucie piasku czy ciała obcego pod powiekami, przynosząc szybką ulgę zmęczonym, podrażnionym i piekącym oczom. Dostępny w praktycznych, jednorazowych ampułkach.

Wskazania

Krople Hyabak UD są przeznaczone do:

- nawilżania oczu w przypadku uczucia suchości lub zmęczenia oczu, spowodowanego czynnikami zewnętrznymi takimi jak: wiatr, dym, zanieczyszczenia, kurz, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, długotrwała praca przed komputerem;
- nawilżania soczewek kontaktowych w celu ich łatwiejszego zakładania i zdejmowania, również do nawilżania oka w czasie ich noszenia.

Skład

Hialuronian sodu, chlorek sodu, aktinokinol, trometamol, kwas chlorowodorowy, woda do wstrzykiwań.

Sposób użycia

- 1 kroplę preparatu należy wkraplać do każdego oka tak często, jak to konieczne.
- Użytkownicy soczewek kontaktowych mogą nanosić preparat na soczewkę podczas jej zakładania lub zdejmowania, jak również tak często, jak jest to niezbędne w trakcie jej noszenia.
- Nie przechowywać otwartych fiolek!

Ostrzeżenia



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie dotykać końcówką fiołki do powierzchni oka.
- Nie wstrzykiwać ani nie połykać.
- Stosowanie kropli nie zastępuje noszenia okularów przeciwsłonecznych.
- Nie stosować, jeśli fiołki są uszkodzone.
- Otwarte fiołki należy wyrzucić natychmiast po zastosowaniu produktu.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

LABORATOIRES THEA
Cicha 7
Warszawa