

# Hyal Drop Multi Krople 10 ml

Cena: 37,53 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HYAL-DROP
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Nawilżające krople do oczu **Hyal-Drop Multi** gwarantują natychmiastowe nawilżenie, przynosząc szybką ulgę zmęczonym, podrażnionym i łzawiącym oczom. Stanowią skuteczne wsparcie dla osób doświadczających łagodnych i umiarkowanych objawów suchego oka, takich jak zmęczenie, podrażnienie, pieczenie i/lub łzawienie.

### Składniki

0,24% hialuronian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny i woda do wstrzykiwań.

### Zastosowanie

Krople do oczu Hyal-Drop Multi można stosować w celu:

- nawilżenia suchych oczu,
- ukojenia oczu podrażnionych i zmęczonych,
- zwilżenia miękkich oraz twardych soczewek kontaktowych podczas noszenia.

### Sposób użycia

- Przed użyciem produktu umyj dokładnie ręce.
- Zdejmij nakładkę ochronną z końcówki butelki.
- Umieść kciuk na ergonomicznym wspierciu dla kciuka i obejmij dolną część butelki palcami. Dwa palce umieść pod spodem butelki.
- Odchyl nieznacznie głowę do tyłu. Odwróć butelkę końcówką do dołu i przytrzymaj pionowo nad okiem. Palcem wolnej ręki delikatnie odciągnij dolną powiekę. Naciśnij pompkę, aby uwolnić jedną kroplę do oka. Po zakropieniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, zamknij powiekę i powoli poruszaj gałką oczną.



- Natychmiast po użyciu strząśnij pozostałości kropli i nałóż nakładkę ochronną na końcówkę butelki.

#### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie dotykać powierzchni oka końcówką butelki, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu powierzchni oka lub zanieczyszczeniu roztworu.
- Nie dotykać końcówki butelki palcami, aby zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu roztworu.
- Po otwarciu, nie należy korzystać z butelki wspólnie z innymi osobami.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

#### Ostrzeżenia

- Informacje dotyczące bezpieczeństwa dla pacjentów z ciężkim uszkodzeniem rogówki: W bardzo rzadkich przypadkach podczas stosowania produktu okulistycznego zawierających fosforany zgłaszano osadzanie się fosforanu wapnia na rogówce.
- Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu do nawilżania oczu i dzieci.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### Producent

Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbutteler Damm 165/173  
13581 Berlin, Niemcy