

Hyal-Drop Pro, nawilżające krople do oczu, 10 ml



Cena: 55,26 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HYAL-DROP
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	BAUSCH HEALTH POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Nawilżające krople do oczu **Hyal-Drop Pro** łagodzą objawy suchego oka, takie jak żywność, podrażnienie i zielone „piasku” pod powiekami. Starannie dobrane wzmacniacze wspierają wszystkie trzy kary filmu łzowego: lipidową, wodną i mucynową.

Składniki

0,24% hialuronian sodu, glicerol, karbomer, trójglicerydy, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań.

Zastosowanie

Poprawa nawilżenia powierzchni gałki ocznej i przywrócenie komfortu w przypadku suchości oczu.

Sposób użycia

- Przed użyciem produktu umyj dokładnie ręce.
- Zdejmij nakładkę ochronną z końcówki butelki.
- Umieść kciuk na ergonomicznym wsparciu dla kciuka i obejmij dolną część butelki palcami. Dwa palce umieść pod spodem butelki.
- Odchyl nieznacznie głowę do tyłu.
- Skieruj butelkę końcówką do dołu i przytrzymaj pionowo nad okiem.
- Palcem wolnej ręki delikatnie odciągnij dolną powiekę.
- Naciśnij pompkę, aby uwolnić jedną kroplę do oka.
- Po zakropieniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, zamknij powiekę i powoli poruszaj gałką oczną.
- Natychmiast po użyciu strząśnij pozostałości kropli i nałóż nakładkę ochronną na końcówkę butelki.
- Ważne! Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym nieużywaniu produktu: skieruj butelkę w dół i naciśnij pompkę do momentu pojawienia się pierwszej kropli.

Przeciwwskazania



Kropki do oczu Hyal-Drop Pro nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Ważne wskazówki

- Bardzo rzadko zgłaszano miejscowe reakcje nadwrażliwości; w takim przypadku należy przerwać stosowanie wyrobu medycznego.
- Jeśli pacjent odczuwa trwały dyskomfort lub podrażnienie, powinien przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Produkt może powodować przemijające, niewyraźne widzenie po zakropleniu, co może mieć niekorzystny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Po otwarciu produkt może być używany przez 6 miesięcy.
- Przed użyciem należy zdjąć soczewki kontaktowe.
- Przed użyciem innego produktu do oczu lub założeniem soczewek kontaktowych należy poczekać co najmniej 15 minut.
- Aby zapobiec możliwemu urazowi powierzchni oka lub zanieczyszczeniu roztworu, nie należy dotykać powierzchni oka końcówką butelki.
- Nie stosować po upływie terminu ważności, ani w przypadku uszkodzenia opakowania lub butelki.
- Krople Hyal-Drop Pro należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w opakowaniu – zawiera ona ważne informacje na temat stosowania tego produktu.
- Przechowywać w temperaturze od 2 do 25°C.

Producent

Dr. Gerhard Mann chem-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbutteler Damm 165/173
13581 Berlin, Niemcy