

HydroClean plus Cavity, opatrunek hydroaktywny 7,5 cm x 7,5 cm, 1 sztuka



Cena: 36,95 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis
HydroClean plus Cavity to hydroaktywny opatrunek medyczny przeznaczony do leczenia ran za pomocą metody wilgotnego opatrzywania.

Wskazania
Produkt wskazany jest do stosowania w szczególności na rany z zaburzeniami procesów gojenia oraz rany trudno i długo gojące się, będące w fazie oczyszczania i granulacji. Opatrunek może być użyty także do leczenia ran zainfekowanych oraz w celu reaktywacji procesów gojenia w fazie stagnacji spowodowanej przez zbyt dużą ilość MMP.

Działanie
Opatrunek HydroClean plus Cavity uwalnia roztwór Ringera do rany, jednocześnie pochłaniając znajdującą się w niej wydzielinę. W ten sposób dochodzi do interaktywnego, ciągłego przepłukiwania rany. Dzięki właściwościom przeciwbakteryjnym produkt hamuje wzrost drobnoustrojów, tym samym zmniejszając ryzyko wystąpienia ponownego zakażenia. Ponadto produkt dezaktywuje metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP), które przyczyniają się do zaburzenia gojenia się rany, dzięki czemu możliwa jest ponowna aktywacja procesów gojących w ranach przewlekłych.

Skład
Opatrunek składa się z chłonnego poliakrylanu sodu (SAP) otoczonego celulozą i ligniną. Z SAP, aktywowanym za pomocą roztworu Ringera powiązana jest substancja antybakteryjna: biguanid polihexametylenowy (PHMB), a całość ze wszystkich stron otoczona jest polipropylenową powłoką.

Sposób użycia
Opatrunek powinien mieć zawsze bezpośrednią styczność z dnem rany, dlatego należy go włożyć do rany głębokiej i zabezpieczyć opatrunkiem górnym. Opatrunek górny powinien w niewielkim stopniu wystawać poza krawędzie rany i zostać zamocowany za pomocą odpowiednich materiałów. Całość należy zmieniać w zależności od potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 3 dni.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować jednego opatrunku dłużej niż 3 dni.
- Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwagi

- Zaleca się zastosowanie odpowiedniego preparatu do ochrony skóry, jeśli skóra w rejonie rany jest szczególnie wrażliwa i osłabiona.
- Zdejmowanie opatrunku u pacjentów ze skłonnością do nasilonego krwawienia należy przeprowadzić szczególnie ostrożnie, można delikatnie odgiąć brzeg wyrobu i nasączyć niewielką ilością roztworu Ringera lub soli fizjologicznej.
- Rany zakażone i narażone na infekcję powinny być leczone przez lekarza, szczególnie jeśli opatrunek mocowany jest za pomocą opatrunku foliowego.
- Przed rozpoczęciem leczenia ran trudno gojących się konieczna jest konsultacja z lekarzem i kontrola stanu rany, a także wyjaśnienie przyczyn zaburzeń w gojeniu.
- Opatrunek HydroClean plus Cavity nie może zastępować przyczynowego leczenia zaburzeń gojenia się rany, w szczególności ogólnoustrojowej terapii antybiotykowej.

Producent

HARTMANN
Partyzancka 133/151
Pabianice