

HydroClean plus, opatrunek hydroaktywny, 7,5 x 7,5 cm, 1 sztuka



Cena: 37,38 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

HydroClean plus to hydroaktywny opatrunek medyczny o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, który absorbuje wysięk z rany i uwalnia płyn Ringera. Dzięki temu usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie się rany.

Wskazania

Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany: przywraca równowagę biochemiczną w łóżysku rany, obniżając poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, zapewnia optymalnie wilgotne środowisko w obrębie rany, niszczy biofilm oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Strona opatrunku stykająca się z raną pokryta jest nieprzywierającymi do rany paskami silikonu. Zewnętrzna warstwa opatrunku pokryta jest wodoszczelną folią polipropylenową, chroniącą przed przemakaniem opatrunku i przedostawaniem się do rany drobnoustrojów chorobotwórczych. Opatrunek pozwala na obniżenie kosztu terapii rany przewlekłej, ryzyka powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta.

Dawkowanie

Opatrunek HydroClean plus usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie się ran. Stymuluje proces gojenia, przywraca równowagę biochemiczną w łóżysku rany obniżając poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Dzięki swym właściwościom absorpcyjnym wchłania wysięk wraz z martwymi tkankami, włóknikiem, drobnoustrojami oraz biofilmem. Produkt posiada nieprzywierające do rany silikonowe paski, warstwa zewnętrzna pokryta jest wodoszczelną folią propylenową, która zapobiega przemakaniu opatrunku.

Stosowanie

1. Wybierz odpowiedni rozmiar opatrunku, tak aby obejmował on całą ranę i nachodził na jej brzegi.
2. Umieść opatrunek białą stroną do rany.
3. Przymocuj całość zewnętrznym opatrunkiem mocującym lub opaską.
4. HydroClean może pozostawać na ranie do 3 dni



Ostrzeżenia

- Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

- Należy go przechowywać w temperaturze, która nie przekracza 30 °C. Ważne jest, aby zawartość była jałowa do momentu, gdy opakowanie jednostkowe nie uległo uszkodzeniu. Nie należy ponownie wyjąławiać opatrunku.
- Opatrunek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu lub zranieniu.
- Przed rozpoczęciem leczenia ran trudno gojących się, zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz powinien ocenić stan rany i wyjaśnić przyczyny zaburzeń w gojeniu się rany. Ważne jest zrozumienie, że leczenie rany przy użyciu opatrunku nie zastępuje leczenia przyczynowego, które może być konieczne w przypadku zaburzeń gojenia się rany.

Producent

HARTMANN
Partyzancka 133/151
Pabianice