

HydroClean Solution, roztwór do oczyszczania i nawadniania ran, 350 ml



Cena: 58,01 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Roztwór
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawadniające, Nawilżające, Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

HydroClean Solution to medyczny roztwór przeznaczony do oczyszczania, nawilżania, płukania i pielęgnacji ran, w tym ostrych, przewlekłych oraz zakażonych, a także oparzeń I i II stopnia.

Wskazania

Wyrób medyczny wskazany do stosowania w przypadku:

- zakażonych i niezakażonych ran ostrych (rany pourazowe, powstałe na skutek skaleczenia, rozerwania, otarcia, zmiżdżenia, ukąszenia, użądlenia itp.);
- zakażonych i niezakażonych ran przewlekłych (owrzodzenia, odleżyny);
- zakażonych i niezakażonych ran termicznych lub chemicznych (oparzenia I i II stopnia, oparzenia chemiczne);
- ran spowodowanych prądem;
- ran popromiennych;
- na obszary wejścia cewników urologicznych;
- podczas pielęgnacji skóry z przetokami lub ropniami;
- potrzeby oczyszczenia rany przed opatrunkiem;
- potrzeby oczyszczenia antyseptycznego, zmiękczenia i usunięcia materiałów opatrunkowych.

Działanie

Wykazuje działanie wspomagające proces gojenia się ran, poprzez zapewnienie oczyszczenia i nawilżenia.

Skład

Woda, poloksamer i poliheksanid (PHMB, 0,1%)

Sposób użycia

- **Oczyszczanie ran:**

Ranę i obszar ją otaczający należy dokładnie oczyścić za pomocą HydroClean Solution. W celu optymalnego oczyszczenia rany zaleca się zwilżenie rany obejmującej tkanki głęboko i intensywnie martwicze, przez minimum 10-15 minut przy użyciu całkowicie zwilżonego kompresu (nakładanie opatrunku na mokro). Aplikację można powtarzać w zależności od warunków rany bez ograniczeń czasowych. Nie rozcieńczać roztworu!

- **Stosowanie z opatrunkami i bandażami:**

Dokładnie zwilżyć za pomocą HydroClean Solution opatrunki i bandaże przylegające do powierzchni rany, odczekać ok. 5-10 minut do zmiękczenia i ostrożnie usunąć je z rany. W celu utrzymania wilgotnego środowiska w ranie, opatrunek można zmieniać codziennie (w razie potrzeby nawet kilka razy w ciągu dnia). HydroClean Solution jest zgodny ze wszystkimi nowoczesnymi opatrunkami do ran.

- **Pielęgnacja cewnika:**

Aby przeciwdziałać możliwym infekcją, należy regularnie oczyszczać za pomocą HydroClean Solution porty wlotowe i elastyczne złącza cewnika oraz jego otoczenie. Obszar ten należy spryskać z niewielkiej odległości i odczekać ok. 1-5 minut. Składniki wyrobu są szczególnie przyjazne dla błon śluzowych, oczyszczają cewnik i materiał PEG bez jego uszkodzenia. Podobnie jak w przypadku pielęgnacji ran, zabrudzone i przywierające plastry można łatwo usunąć po zwilżeniu za pomocą HydroClean Solution.

Przeciwwskazania

Nie stosować wyrobu medycznego:

- na chrząstce szklistej i w aseptycznych zabiegach chirurgicznych, w uchu środkowym i wewnętrznym oraz w oku;
- jeżeli wiadomo, lub gdy podejrzewa się, że pacjent jest nadwrażliwy na którykolwiek ze składników;
- przy procedurach dotyczących centralnego układu nerwowego lub opon mózgowo-rdzeniowych.
- wraz z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami czyszczącymi, kremami, olejami, enzymami itp. Substancje te powinny być całkowicie

usunięte z powierzchni rany przed użyciem produktu;

- do płukania i mycia otrzewnej.

Uwagi

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w chłodnym, suchym i nieosłoniętym miejscu.
- Po otwarciu należy zużyć w ciągu 8 tygodni.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Nie stosować do iniekcji ani do celów infuzyjnych.

Producent

ACTO GMBH

Galeria

