

Hydrocoll, 7,5 cm x 7,5 cm, opatrunek hydrokoloidowy, 10 sztuk



Cena: 133,29 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Przeznaczenie	Nawilżające, Ochronne, Wspierające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Hydrocoll to samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, który składa się z warstwy koloidowej pokrytej folią poliuretanową.

Działanie

Produkt wchłania wydzielinę z rany. Po wchłonięciu wydzieliny warstwa hydrokoloidowa zmienia się w żel, który stwarza wilgotne środowisko ułatwiające gojenie się rany. Folia poliuretanowa zapobiega dostawianiu się drobnoustrojów do rany. Folia jest hydrofobowa, paro- i gazoprzepuszczalna. Ze względu na to, że żel wytwarza się po nałożeniu opatrunku, nie przywiera on do rany i jego zmiana nie zakłóca procesu gojenia. Wytwarzająca się nowa tkanka nie zostaje uszkodzona.

Dzięki zastosowaniu cienkich, elastycznych materiałów, Hydrocoll łatwo dostosowuje się do kształtu ciała. Powierzchnia Hydrocoll zapobiega przywieraniu wody i zanieczyszczeń.

Skład

Hydrocoll jest wykonany z poliuretanowej powłoki okrywającej przepuszczalnej dla gazów. Warstwa hydrokoloidowa zawiera głównie sól sodową karboksymetylocelulozy, spoiwo (estry glicerolu lub wysoce uwodornioną, rafinowaną żywicę naturalną), elastomer syntetyczny (liniowy kopolimer trybłokowy na bazie styrenu i izoprenu) oraz olej mineralny.

Sposób użycia

Wybierz Hydrocoll o właściwym kształcie i rozmiarze. Opatrunek musi być szerszy o ponad centymetr niż rana, aby stabilnie przylegał do ciała. W razie potrzeby przyciąć opatrunek jałowymi nożyczkami w celu dopasowania go do wielkości rany.

- Usunąć papier ochronny, umieścić Hydrocoll na ranie, dopasuj brzegi i dociśnij.
- Wskutek wchłaniania wysięku powstaje żel w kolorze białym, który jest widoczny od zewnątrz jako odbarwienie/pęcherz. Hydrocoll należy wymienić, gdy pęcherz ten osiągnie niemal brzegi opatrunku. W przypadku wycieku wydzieliny z opatrunku należy go natychmiast wymienić. Aby wymienić opatrunek, należy unieść brzegi Hydrocoll i ostrożnie zdjąć cały opatrunek.
- Warstwa żelu hydrokoloidowego może pozostać na ranie. Nie utrudnia ona gojenia rany. W razie potrzeby można go zmyć wodą.



- Czas noszenia opatrunku zależy od stanu rany oraz ilości wydzieliny, jednak może on pozostać na ranie do 7 dni.

Przeciwwskazania

Hydrocoll nie wolno stosować z uczuleniem na którykolwiek ze składników. Hydrocoll nie należy stosować do głębokich ran sięgających do mięśni, ścięgien lub kości. Nie należy stosować produktu na rany z infekcją kliniczną lub oparzenia trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

HARTMANN