

Hydrosorb Gel, żel jałowy, 15 g, 1 strzykawka

Cena: 28,93 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Żel
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hydrosorb Gel to jałowy żel o masie 15 g, klasyfikowany jako wyrób medyczny. Dostarczany jest w wygodnym aplikatorze przypominającym strzykawkę, co ułatwia precyzyjne dozowanie. Może być stosowany w połączeniu z dowolnym typem opatrunku.

Wskazania

Hydrosorb Gel, żel jałowy przeznaczony jest do leczenia ran przewlekłych, głównie głębokich, lecz także powierzchniowych takich jak odleżyny, owrzodzenia oraz rany innego pochodzenia o małym wysięku lub prawie suchych, we wszystkich fazach gojenia. Rekomendowany jest do zmiękczenia tkanki martwicznej oraz do uwodnienia głębokich ran przewlekłych w fazie ziarninowania.

Działanie

Hydrosorb Gel, żel jałowy:

- amorficzny,
- przezroczysty hydrożel,
- po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko
- rozmięcza suchą tkankę martwiczą i ułatwia jej usunięcie.
- minimalizuje ból podczas zmiany opatrunku.
- dozownik w formie strzykawki z podwójną podziałką, umożliwiającą bardzo dokładny odczyt zarówno ilości oddanej do rany, jak i pozostałej w strzykawce,

zapewnia precyzyjne dozowanie żelu oraz ułatwia prowadzenie dokumentacji rany.

- dzięki możliwości całkowitego wyciśnięcia zawartości strzykawki, wykorzystanie żelu jest bardzo ekonomiczne

Skład

Woda z elektrolitycznym składem na bazie roztworu Ringera, gliceryny, hydroksyetylocelulozy, celulozy i carbomeru.

Sposób użycia

- Ranę należy przemyć sterylnym roztworem Ringera lub innym sterylnym roztworem nadającym się do tego celu. Następnie osuszyć skórę wokół rany.
- Wyciągnąć sterylną strzykawkę z opakowania i usunąć kołpak ochronny.
- Trzymając końcówkę strzykawki w pewnej odległości od rany pokryć ranę około 5-milimetrową warstwą żelu.
- Na ranę nałożyć odpowiedni opatrunek wtórny.
- Aby usunąć Hydrosorb Gel należy przepłukać ranę sterylnym roztworem Ringera lub innym sterylnym roztworem nadającym się do tego celu. Następnie osuszyć skórę wokół rany.
- Częstotliwość zmieniania opatrunku zależy od rany.
- Może pozostać na ranie maksymalnie 3 dni.
- Należy zmienić opatrunek w przypadku nasiąknięcia opatrunku wtórnego wydzieliną z rany.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na produkt lub jedną z substancji wchodzących w skład.
- Nie stosować w oparzeniach III stopnia.
- Nie zużyty żel należy wyrzucić.
- Zawartość strzykawki nie może być wykorzystana w leczeniu kilku pacjentów jednocześnie.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- W przypadku infekcji rany pacjent powinien codziennie poddawać się kontroli lekarskiej oraz odpowiedniemu systematycznemu leczeniu. Opatrunek należy zmieniać zgodnie z zaleceniami lekarza. Leczenie rany zainfekowanej z wykorzystaniem Hydrosorb Gel może być kontynuowane pod nadzorem lekarza, stosowanie do jego zaleceń.
- Przechowywać w temperaturze od 5oC do 40oC.
- Chronić przed światłem słonecznym.
- Nie zamrażać.
- Nie używać, gdy strzykawka jest uszkodzona.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie poddawać ponownej sterylizacji.

Producent

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o
Żeromskiego 17
95-200 Pabianice