

HydroTac, 20 cm x 20 cm, opatrunek piankowy z hydrożelem, 1 opatrunek

Cena: 38,26 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

HydroTac to opatrunek wykonany z pianki, który posiada warstwę hydrożelu. Jest on stosowany do opatrywania ran w fazie ziarninowania i epitelializacji, które charakteryzują się niewielkim lub umiarkowanym wysiękiem.

Działanie

Dzięki swojej strukturze HydroTac wchłania wysięk z rany i uwalnia wilgoć. Pozwala to na zapewnienie w obrębie rany niezbędnego wilgotnego środowiska działającego stymulująco na gojenie się rany. Dzięki żelowi znajdującemu się od strony rany opatrunek nie przywiera do niej. Umożliwia atraumatyczną zmianę opatrunku.

Ponieważ opatrunek HydroTac Comfort posiada na obrzeżu taśmę klejącą, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych materiałów mocujących opatrunek.

Skład

HydroTac jest kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Podstawą opatrunku jest pianka poliuretanowa. Warstwę opatrunku od strony rany stanowi hydrożel. Warstwa hydrożelu ma postać siatki, co pozwala na swobodne przejście wysięku do chłonnej warstwy piankowej.

Sposób użycia

Wybrać opatrunek o takiej wielkości, aby wystawał poza brzegi rany, odpowiednio do stanu skóry wokół rany (na ok. 1-2 cm). W razie potrzeby opatrunek HydroTac można przyciąć do wymaganego rozmiaru, używając wyłącznie wyjałowionych nożyczek. Przed nałożeniem produktu posiadającego na obrzeżu taśmę klejącą należy się upewnić, że otaczająca ranę skóra jest sucha, czysta i niepokryta sebum.

Białą folię ochronną należy oderwać zgodnie z numeracją (1 i 2), przykładając opatrunek do rany stroną pokrytą żelem. Do przymocowania należy użyć odpowiedniego opatrunku dodatkowego.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Przeciwwskazania

Opatrunku HydroTac nie należy stosować u pacjentów przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników, zwłaszcza na glikol propylenowy, poliuretan albo klej na bazie akrylu.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

HARTMANN