

HydroTac, opatrunek jałowy, 10 cm x 20 cm, 1 sztuka (z opakowania 10 sztuk)



Cena: 22,56 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

HydroTac jest kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Podstawą opatrunku jest pianka poliuretanowa. Warstwę opatrunku od strony rany stanowi hydrożel. Warstwa hydrożelu ma postać siatki, co pozwala na swobodne przejście wysięku do chłonnej warstwy piankowej. Pianka poliuretanowa szybko wchłania nadmiar wysięku rany i zamyka go w swojej strukturze. Nie oddaje go nawet pod wpływem terapii uciskowej. Hydrożel uwalnia wilgoć do rany utrzymując w niej wilgotne środowisko, sprzyjające ziarninowaniu i odbudowie nabłonka. Hydrożel zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany. Zmiany opatrunku przebiegają bezboleśnie. Warstwa hydrożelu daje opatrunkowi efekt początkowej przylepności „Initial Tack”. Dzięki temu zakładanie opatrunku staje się dużo prostsze. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest wodoodporną folią poliuretanową, chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powietrza i pary wodnej.

Działanie

Opatrunek HydroTac służy do zaopatrywania ran trudno gojących się, zarówno sączących jak i relatywnie suchych, w fazie ziarninowania i epitelializacji. Doskonale nadaje się do stosowania w połączeniu z terapią kompresyjną w przypadkach owrzodzeń podudzi pochodzenia żylnego

Stosowanie

Wybrać opatrunek o takiej wielkości, aby wystawał poza brzegi rany na ok. 1–2 cm. Opatrunek HydroTac można pozostawić na ranie do siedmiu dni. Zmiana opatrunku jest konieczna, gdy jest to wskazane ze względów klinicznych lub gdy przy brzegach opatrunku jest widoczny wysięk. W celu zmiany opatrunku HydroTac należy delikatnie oderwać jeden róg i ostrożnie zdjąć opatrunek, aby uniknąć zdzierania skóry.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia wyrobu.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub



działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwagi

- Przed każdym opatrzeniem rany trudno gojącej się należy skonsultować z lekarzem jej stan oraz określić przyczyny hamujące proces gojenia. W takich przypadkach leczenie ran z zastosowaniem opatrunku HydroTac nie zastąpi leczenia przyczynowego.
- Opatrunek HydroTac można stosować do ran zainfekowanych klinicznie oraz w obrębie odstępniętych kości i ścięgien tylko pod nadzorem lekarza.
- W przypadku ran oparzeniowych drugiego (II b) i trzeciego stopnia opatrunek HydroTac można stosować pod nadzorem lekarza po przeprowadzeniu nekrosektomii lub leczenia.

Producent

HARTMANN
Partyzancka 133/151
Pabianice