

HydroTac Transparent Comfort, 10 cm x 10 cm, opatrunek hydrożelowy, 10 opatrunków

Cena: 253,72 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Chłodzące, Nawilżające, Ochronne, Wspierające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

HydroTac Transparent Comfort to przezroczysty, wodoodporny opatrunek hydrożelowy wykonany z uwodnionego poliuretanu.

Wskazania

HydroTac Transparent nadaje się do leczenia ran w fazie ziarninowania i epitelizacji bez wydzieliny lub przy niewielkiej wydzielinie z ran

Dawkowanie

- Zapewnia ranie optymalny balans wilgoci dzięki wysokiej zawartości wody (około 60%);
- Wspiera proces gojenia;
- Ze względu na swoją wilgotną powierzchnię opatrunek chłodzi, a tym samym uśmierza ból i zapewnia komfort pacjentom;
- Dobre właściwości wyścielające opatrunku zapewniają ochronę dla procesu gojenia;
- Przezroczystość opatrunku pozwala na kontrole stanu rany w dowolnym momencie, bez konieczności jego zmiany;
- Umożliwia bezbolesną zmianę, ponieważ nie przywiera do obszaru rany;
- Ze względu na integralność żelu nie pozostawia na skórze resztek opatrunku;

Skład

HydroTac Transparent jest opatrunkiem hydrożelowym z uwodnionego poliuretanu. Tylne strona składa się z przepuszczalnej dla pary wodnej oraz nieprzepuszczalnej dla płynów i bakterii warstwy poliuretanu.

Sposób użycia

Należy wybrać taką wielkość opatrunku HydroTac Transparent, aby wystawał on o 1–2 cm poza brzeg rany. W razie potrzeby opatrunek HydroTac Transparent można przyciąć do wymaganego rozmiaru, używając wyłącznie wyjąłowanych nożyczek.

Zakładanie opatrunku HydroTac Transparent: oderwać niebieską warstwę ochronną zgodnie z numeracją (1 i 2). Przyłożyć opatrunek do



rany stroną nasączoną żelem i zamocować za pomocą odpowiednich materiałów opatrunkowych.
Opatrunek HydroTac Transparent można pozostawić na ranach do siedmiu dni. W celu zmiany opatrunku należy delikatnie oderwać jeden róg i ostrożnie zdjąć opatrunek.

Przeciwwskazania

- Opatrunek HydroTac Transparent nie należy stosować u pacjentów przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników, zwłaszcza na poliuretan, glicerynę albo klej na bazie akrylu.
- Nie należy stosować na ranach zakażonych klinicznie oraz na ranach oparzeniowych 3. stopnia.

Ostrzeżenia

- Każdorazowo przed przystąpieniem do opatrywania ran trudno gojących się konieczna jest dokładna lekarska ocena stanu rany i ustalenie przyczyn wszelkich zaburzeń w gojeniu się rany. Opatrywanie rany za pomocą opatrunku HydroTac Transparent nie może zastąpić przyczynowego leczenia zaburzeń gojenia się rany.
- Ponowne użycie wyrobu medycznego przeznaczonego do jednorazowego użytku jest niebezpieczne. Przetwarzanie w celu ponownego użycia może poważnie naruszyć integralność oraz prawidłowość działania danego wyrobu medycznego.
- Z czasem produkt może się przebarwić, co nie ma wpływu na jego działanie. Chronić przed dziećmi.

Producent
HARTMANN