

HydroTac Transparent Comfort, 6,5 cm x 10 cm, opatrunek hydrożelowy, 10 opatrunków



Cena: 128,87 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Chłodzące, Nawilżające, Ochronne, Wspierające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis
HydroTac Transparent Comfort to przezroczysty, wodoodporny opatrunek hydrożelowy wykonany z uwodnionego poliuretanu.

Wskazania
Do długotrwałego leczenia ran suchych lub z niewielkim wysiękiem w fazie ziarninowania i epitelializacji.

- Działanie**
- Zapewnia ranie optymalny balans wilgoci dzięki wysokiej zawartości wody (około 60%);
 - Wspiera proces gojenia;
 - Ze względu na swoją wilgotną powierzchnię opatrunek chłodzi, a tym samym uśmierza ból i zapewnia komfort pacjentom;
 - Dobre właściwości wyścielające opatrunku zapewniają ochronę dla procesu gojenia;
 - Przezroczystość opatrunku pozwala na kontrole stanu rany w dowolnym momencie, bez konieczności jego zmiany;
 - Umożliwia bezbolesną zmianę, ponieważ nie przywiera do obszaru rany;
 - Ze względu na integralność żelu nie pozostawia na skórze resztek opatrunku;

Skład
HydroTac Transparent Comfort jest opatrunkiem hydrożelowym z uwodnionego poliuretanu. Tylne strona składa się z przepuszczalnej dla pary wodnej oraz nieprzepuszczalnej dla płynów i bakterii warstwy poliuretanu. HydroTac Transparent Comfort dodatkowo posiada na brzegach warstwę samoprzylepną, pokrytą klejem poliakrylanowym.

Sposób użycia
HydroTac Transparent Comfort posiada przyjazną dla skóry ramkę z folii samoprzylepnej pokrytej klejem na bazie poliakrylu. Dlatego do mocowania opatrunku nie są potrzebne żadne inne (mocujące) materiały.



Zakładanie opatrunku HydroTac Transparent Comfort: oderwać niebieską warstwę ochronną zgodnie z numeracją (1 i 2), przyłożyć opatrunek do rany stroną nasączoną żelem i należycie docisnąć brzeg z klejem. Następnie zdjąć warstwę wierzchnią zgodnie z numeracją (3 i 4).

Opatrunek HydroTac transparent można pozostawić na ranach do siedmiu dni. W celu zmiany opatrunku HydroTac Transparent Comfort należy delikatnie oderwać jeden róg i ostrożnie zdjąć opatrunek.

Przeciwwskazania

- Opatrunku HydroTac transparent nie należy stosować u pacjentów przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników, zwłaszcza na poliuretan, glicerynę albo klej na bazie akrylu.
- Nie należy stosować na ranach zakażonych klinicznie oraz na ranach oparzeniowych 3. stopnia.

Ostrzeżenia

- Każdorazowo przed przystąpieniem do opatrywania ran trudno gojących się konieczna jest dokładna lekarska ocena stanu rany i ustalenie przyczyn wszelkich zaburzeń w gojeniu się rany. Opatrywanie rany za pomocą opatrunku HydroTac Transparent Comfort nie może zastąpić przyczynowego leczenia zaburzeń gojenia się rany.
- Ponowne użycie wyrobu medycznego przeznaczonego do jednorazowego użytku jest niebezpieczne. Przetwarzanie w celu ponownego użycia może poważnie naruszyć integralność oraz prawidłowość działania danego wyrobu medycznego.
- Z czasem produkt może się przebarwić, co nie ma wpływu na jego działanie. Chronić przed dziećmi.

Producent

HARTMANN