

Hylo Parin, krople do oczu, 10 ml

Cena: 78,29 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HYLO
Opakowanie	10 ml
Postać	Krop do oczu
Producent	URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hylo Parin wyrób medyczny to krople polecane są do nawilżania i pielęgnacji rogówki i spojówek w przypadku podrażnień oczu.

Składniki

1 mg/ml hialuronianu sodu, 1300 j.m./ml heparynian sodu (uzyskany z błony śluzowej jelita świńskiego), glicerol, bufor cytrynianowy, woda.

Zastosowanie

- Łagodzenie podrażnień oczu połączone z zaczerwienieniem, pieczeniem i swędzeniem, poczucie obecności piasku pod powiekami, suchość oczu.
- Przebywanie w klimatyzowanych lub zakurzonych pomieszczeniach, intensywna praca przed monitorem komputera lub oglądanie telewizji.

Sposób użycia

- Zwykle zakrapla się 1 kroplę do worka spojówkowego każdego oka 3 do 6 razy dziennie.
- Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu po powierzchni oczu,
- Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy,
- Zalecamy zakroplenie Hylo Parin 30 minut po założeniu soczewek kontaktowych na oczy, w celu uniknięcia ewentualnych reakcji nietolerancji między środkiem do pielęgnacji soczewek a preparatem Hylo Parin. Należy liczyć się z wystąpieniem smug na soczewkach, które jednak zwykle znikają po kilku mrugnięciach.

Przeciwwskazania



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

URSAPHARM
Industriestraße
66129 Saarbrücken
Niemcy