

Hysan, nawilżający aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 28,64 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozol
Producent	URSAPHARM POLAND SP.Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające, Regenerujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hysan to medyczny spray nawilżający do nosa. Jest to izotoniczny, sterylny roztwór, który wspomaga nawilżenie, oczyszczanie oraz udrażnianie błony śluzowej nosa. Jego skład został starannie opracowany tak, by jak najlepiej współgrać z naturalnymi funkcjami śluzówki nosowej.

Wskazania

Wyrób medyczny Hysan, nawilżający aerozol do nosa przeznaczony jest do długotrwałego nawilżenia śluzówki nosa. Zalecany jest jako środek wspomagający w przypadku nieżytu nosa

Działanie

Hysan, nawilżający aerozol do nosa:

- składnikiem jest hialuronian sodu, który dobrze trzyma się błony śluzowej nosa i tworzy warstwę ochronną, utrzymującą się na długo, dodatkowo jest higroskopijny, czyli posiada zdolność wiązania wody.

Skład

Hialuronian sodu 0,04%, chlorek sodu, bufor fosforanowy, woda.

Sposób użycia

- Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nasadkę z dozownika.
- Przycisnąć dozownik do momentu aktywacji rozpylania roztworu (zazwyczaj 1-2 razy).
- Otwór dozownika należy wprowadzić do otworu nosowego i przycisnąć jeden raz dozownik wykonując przy tym lekki wdech.
- W zależności od potrzeb rozpylać kilka razy dziennie 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego.
- Ze względów higienicznych należy wytrzeć dozownik po każdym użyciu i nałożyć nasadkę.
- Brak ograniczeń odnośnie do okresu stosowania.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Przeciwwskazania

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy

Producent

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35,
66129 Saarbrücken, Niemcy