

Hysan woda morska, aerozol do nosa, 20 ml



Cena: 28,60 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozol
Producent	URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hysan to aerozol z wodą morską do nosa. To wyrób medyczny przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej pierwszego roku życia. Zawiera hipertoniczny roztwór soli morskiej, czyli taki, w którym stężenie soli jest wyższe niż w płynach ustrojowych i komórkach organizmu. Preparat działa poprzez naturalne zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa, zapewniając jej nawilżenie już po pierwszym użyciu. Dzięki wysokiemu stężeniu soli, nadmiar płynu zostaje usunięty ze śluzówki, co jest szczególnie korzystne przy stanach zapalnych nosa, takich jak przeziębienie. Redukcja obrzęku umożliwia swobodne oddychanie, a dodatkowe nawilżenie i usuwanie płynu tkankowego pomagają rozrzedzić zalegającą wydzielinę. W efekcie aerozol wspiera naturalny proces leczenia infekcji nosa i zatok.

Skład

Naturalna sól morska 27.0 mg/ml i woda do wstrzykiwań.

Sposób użycia

- Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nasadkę z dozownika. Przycisnąć dozownik do momentu aktywacji rozpylania roztworu (zazwyczaj 1-2 razy).

Teraz system jest gotowy do stosowania.

- Otwór dozownika należy wprowadzić do otworu nosowego i przycisnąć jeden raz dozownik wykonując przy tym lekki wdech. W zależności od potrzeb rozpylać kilka razy dziennie 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego.
- Ze względów higienicznych należy wytrzeć dozownik po każdym użyciu i nałożyć nasadkę. Wskazówka dotycząca stosowania: ze względów higienicznych i w celu uniknięcia ewentualnego przeniesienia zakażenia każdy aerozol powinien być używany tylko przez jedną osobę. Zaleca się także wycieranie otworu dozownika po użyciu i utrzymywanie go w suchości.

Uwagi

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie stosować jej po upływie terminu ważności.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Wodę morską w aerozolu do nosa hysan® należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy. Należy zapisać datę otwarcia na opakowaniu i zachować je.

Producent

URSAPHARM POLAND
ul. Wybrzeże Gdyńskie

01-531 Warszawa