

Ialuril Prefill, 1 ampułko-strzykawka 50 ml

Cena: 13,72 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 ampułko-strzykawka po 50 ml
Postać	Roztwór
Producent	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Przeznaczenie	, Zapalenie dróg moczowych
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Ialuril Prefill jest wyrobem medycznym, który łączy w sobie hialuronian sodu, siarczan chondroityny oraz chlorek wapnia. Dzięki obecności chlorku wapnia preparat może zostać wbudowany w strukturę bariery, co pozwala na odtworzenie jej właściwości ochronnych.

Działanie

Przywraca warstwy glikozaminoglikanów w tkance urotelium pęcherza.

Składniki

Woda, chlorek wapnia, sól sodową kwasu hialuronowego, sól sodową siarczanu chondroityny.

Stosowanie

Instrukcja stosowania dla pacjentów z cewnikiem:

- Po spontanicznym oddaniu moczu przez pacjenta należy opróżnić pęcherz z wszystkich pozostałości moczu, wprowadzając odpowiedni sterylny cewnik przez zewnętrzne ujście cewki moczowej i odczekać, aż wypłynie cały mocz zebrany w pęcherzu (na tym etapie zaleca się zastosowanie cewnika CH 8);
- Dokręcić tłok dostarczony z ampułko- -strzykawką, aż będzie dokładnie na swoim miejscu;
- Zamocować łącznik Luer-Lock na górze ampułko-strzykawki i nałożyć na niego sterylny cewnik, który wcześniej umieszczono w pęcherzu;
- Powoli podawać przez cewnik do pęcherza cały roztwór znajdujący się w strzykawce;
- Po podaniu produktu do pęcherza, ostrożnie wyjąć cewnik ze strzykawki i wyrzucić;
- Utrzymać wyrób medyczny IALURIL Prefill w pęcherzu jak najdłużej (minimalny zalecany czas: 30 minut).

Instrukcja stosowania dla pacjentów a adapterem:

- Przed rozpoczęciem zabiegu pacjent proszony jest o oddanie moczu i całkowite opróżnienie pęcherza przed podaniem produktu;

- Dokręcić tłok dostarczony z ampułko- -strzykawką, aż będzie dokładnie na swoim miejscu;
- Zamocować adapter IALUADAPTER na górze ampułko-strzykawki wykonując pół obrotu w celu uzyskania stabilnego połączenia;
- Powoli podać do pęcherza cały roztwór znajdujący się w strzykawce za pomocą adaptera IALUADAPTER;
- Po podaniu produktu do pęcherza, ostrożnie wyjąć adapter IALUADAPTER ze strzykawką i wyrzucić;
- Utrzymać wyrób medyczny IALURIL Prefill w pęcherzu jak najdłużej (minimalny zalecany czas: 30 minut).

Przeciwwskazania

- Nie stosować wyrobu medycznego IALURIL Prefill po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Nie stosować łącznika Luer-Lock, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Nie stosować adaptera IALUADAPTER jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Nie stosować wyrobu medycznego IALURIL Prefill, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Nie stosować wyrobu medycznego IALURIL Prefill, jeżeli widoczne są zanieczyszczenia lub osady w wyrobie.
- Nie sterylizować ponownie. Wyrób medyczny IALURIL Prefill jest przeznaczony wyłącznie do użytku jednorazowego.
- Nie stosować ponownie części niewykorzystanego roztworu.
- Nie stosować ponownie, aby uniknąć ryzyka skażenia.

Producent

IBSA