

Iana Intensive, intensywnie nawilżające krople do oczu, 0,3% HA, 10 ml



Cena: 2,36 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	STARPHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Iana Intensive to izotoniczne krople do oczu, które zapewniają długotrwałą ulgę i ukojenie dla wysuszonych oraz zaczerwienionych oczu. Ich nawilżająca formuła pomaga zmniejszyć dyskomfort spowodowany czynnikami zewnętrznymi, takimi jak suche powietrze czy długotrwała praca przy komputerze. Krople można stosować bez konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych, co czyni je wygodnym rozwiązaniem dla osób o wrażliwych oczach.

Wskazania

Iana Intensive są polecane do oczu wrażliwych, zaczerwienionych i wysuszonych. Mogą być bezpiecznie stosowane ze wszystkimi typami soczewek kontaktowych.

Działanie

Działanie wyrobu opiera się na właściwościach kwasu hialuronowego (HA) zawartego w preparacie, a który jest naturalną, fizjologiczną substancją występującą w oku. Substancja ta tworzy równomierny, nawilżający i trudno zmywalny film na powierzchni oka, który chroni przed podrażnieniami i suchością.

Skład

Hialuronian sodu 0,3% w izotonicznym zbuforowanym roztworze, PHMB (biguanid poliheksametylenowy) 0,0001% środek konserwujący.

Stosowanie

O ile lekarz nie zalecił inaczej, aplikować 1-2 krople do każdego oka. Następnie zamrugać kilka razy w celu rozprowadzenia kropli po jego powierzchni.

Sposób użycia

- Wyrób medyczny może być stosowany z soczewkami kontaktowymi.

- Przed pierwszym użyciem należy zerwać zabezpieczenie i zdjąć nasadkę ochronną.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia wyrobu medycznego.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Zużyć w ciągu 90 dni od pierwszego otwarcia opakowania.
- Stosować wyłącznie do oczu.
- Wyrób przeznaczony jest do stosowania przez jedną osobę.
- Podczas aplikacji nie dotykać oka lub innej powierzchni końcówką zakraplacza.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Przechowywać w temperaturze od 5 do 30°C, w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

STARPHARMA SP. Z O.O.

Jedności 9

05-506 Lesznowola

customerservice@starpharma.pl

Galeria

