


Iglessy, sterylne igły do penów insulinowych, 31G, 5 mm, 100 sztuk

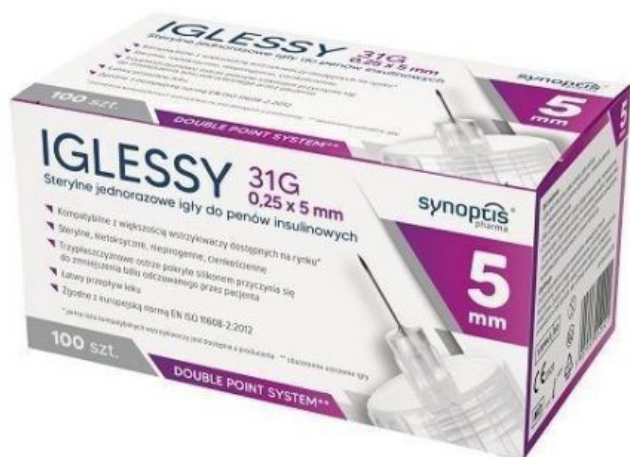

Cena: 18,99 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków
Opakowanie	100 sztuk
Postać	Igły
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Iglessy to sterylne, jednorazowe igły przeznaczone do stosowania z penami insulinowymi. Ten wyrób medyczny służy do wykonywania podskórnych wstrzyknięć płynnych leków za pomocą odpowiedniego wstrzykiwacza.

Działanie

Igły insulinowe Iglessy to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem (penem) do podskórnych iniekcji płynnych leków do organizmu.

Sposób użycia

- Pociągnąć za etykietkę, aby usunąć ją z igły do wstrzykiwacza.
- Przymocować igłę do wstrzykiwacza, a następnie przekreślić, aby zabezpieczyć połączenie.
- Zdjąć zewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza.
- Zdjąć wewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi wstrzykiwania insuliny.
- Założyć osłonę zewnętrzną na igłę do wstrzykiwacza oraz wstrzykiwacz.
- Wyrzucić igłę do wstrzykiwacza do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Igła jest sterylna tylko wtedy, gdy osłony i opakowanie są szczelnie zamknięte i nieuszkodzone.
- Nie używać ponownie.
- Przed wstrzyknięciem należy zdjąć zewnętrzną i wewnętrzną osłonę igły. Jeśli obie osłony nie zostaną usunięte, dawka leku może nie zostać wstrzyknięta, co może skutkować poważnymi komplikacjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Producent



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

SYNOPTIS PHARMA