

Imutest Alergia panel wziewny, test do wykrywania przeciwciał IgE (kot, roztocza, pyłki traw), 1 zestaw

Cena: 166,59 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Imutest Alergia panel wziewny to domowy test kasetkowy zaliczany do wyrobów medycznych, służący do wykrywania specyficznych przeciwciał IgE. Test identyfikuje reakcje alergiczne na główne alergeny wziewne, takie jak: uteroglobulina Fel d1 (obecna w ślinie i gruczołach łojowych kota), proteaza cysteinowa Der p 1 (pochodząca od roztoczy kurzu domowego – Dermatophagoides pteronyssinus) oraz alergen g6 (pyłki traw), który obejmuje kluczowe komponenty: Phl p 1, Phl p 2, Phl p 5, Phl p 6, Phl p 7 i Phl p 12.

Wskazania

Test wskazany jest w celu diagnostyki alergii, przy:

- pojawiających się objawach astmatycznych (świszczący oddech, kaszel, spastyczność oskrzeli),
- pojawiającym się kichaniu, nieżycie nosa,
- swędzących, łzawiących i opuchniętych oczach,
- reakcjach anafilaktycznych,
- alergicznych objawach skórnych (pokrzywka, świąd, rumień).

Przeznaczenie

Test przeznaczony jest do wykrywania nadwrażliwości na główne alergeny kota, roztoczy kurzu domowego oraz pyłków traw. Wyniki uzyskane przy użyciu Imutest Alergia panel wziewny są porównywalne z wynikami profesjonalnych metod diagnostycznych (ImmunoCAP).

Test można przeprowadzić niezależnie od pory roku. Nie jest koniecznym występowanie objawów alergii w czasie wykonywania testu. Preparat nie wymaga odstawienia leków przeciwalergicznych przed jego zastosowaniem.

Test można przeprowadzić u każdego, bez względu na wiek. Wyrób zapewnia szybkie wyniki z niewielkiej próbki krwi z nakłucia opuszki palca lub pięty (małe dzieci).



Sposób użycia

Skrócona instrukcja obsługi:

- Przed użyciem dokładnie umyj ręce a następnie wytrzyj je do sucha.
- Nakłuj opuszek palca przy użyciu dołączonego do zestawu sterylne nakłuwacza.
- Pobierz próbkę krwi za pomocą kapilary.
- Nanieś krew na mniejsze okienko znajdujące się w kasetce testowej.
- Odczekaj 15 minut, a następnie odciągnij niebieski suwak z kasetki testowej.

Producent

DIATHER
Ku Ujściu 19
80-701 Gdańsk