

Inadine, opatrunek, 5 x 5 cm, 1 sztuka

Cena: 5,51 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	ASPIRONIX POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Przeciwwirusowe, Przeciwgrybicze
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Inadine to jałowy opatrunek medyczny zawierający 10% jodopowidonu. Stosuje się go w przypadku ran już zakażonych lub narażonych na rozwój infekcji.

Wskazania

Produkt wskazany jest do stosowania na rany powierzchniowe, zainfekowane lub z ryzykiem wystąpienia infekcji (np. rany przewlekłe, otarcia i skaleczenia, odleżyny, rany pooperacyjne).

Działanie

Opatrunek Inadine dzięki zawartości jodu, który jest stale uwalniany do łóżyska rany charakteryzuje się szerokim spektrum przeciwbakteryjnym (bakterie gram - i gram +, bakterie beztlenowe), eliminuje także zarodniki, grzyby, drożdżaki i wirusy. Długotrwałe stosowanie opatrunku nie powoduje u bakterii wytworzenia się oporności na jego działanie. Opatrunek nie przywiera do rany, więc nie powoduje bólu podczas jego usuwania.

Skład

Produkt wykonany został z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności, która impregnowana została glikolem polietylenowym zawierającym 10% jodopowidonu (1,0% dostępnego jodu).

Sposób użycia

1. Zdejmij papierowe warstwy ochronne.
2. Nałóż opatrunek na ranę.
3. Zastosuj opatrunek wtórny.
4. W celu usunięcia opatrunku delikatnie rozciągnij jego przeciwległe rogi.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jod, przed i po leczeniu izotopem jodu u chorych z zaburzoną czynnością nerek.



Właściwości

- Produkt jałowy, jednokrotnego użytku.
- Można go dowolnie przycinać - opatrunek nie strzępi się.

Uwagi

- Produkt jednokrotnego użytku.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LTD
Building 47, Charnwood Campus, 10 Bakewell Road,
LE11 5RB Loughborough, England