


## Inadine, opatrunek, 9,5 x 9,5 cm, 1 sztuka

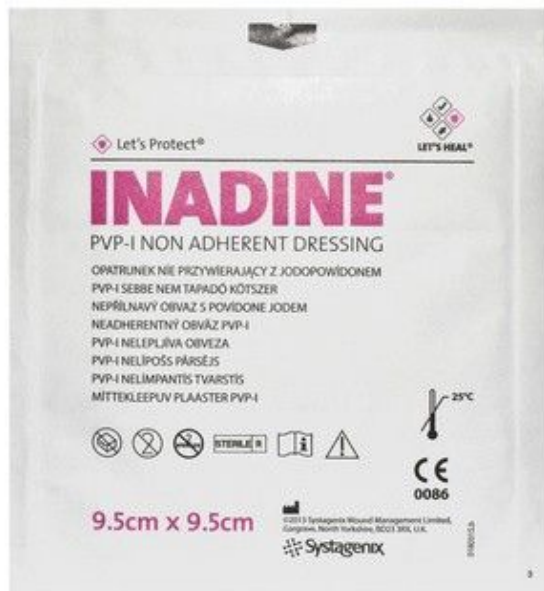

Cena: 12,42 zł

### Opis słownikowy

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                                |
| Opakowanie      | 1 sztuka                                                |
| Postać          | Opatrunek                                               |
| Producent       | ASPIRONIX POLSKA SP. Z O.O.                             |
| Przeznaczenie   | Przeciwbakteryjne, Przeciwwirusowe, Przeciwgrzybicze    |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                                          |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

### Opis produktu

#### Opis

**Inadine** to sterylny opatrunek medyczny zawierający 10% jodopowidonu, przeznaczony do stosowania na rany zakażone lub narażone na rozwój infekcji.

#### Wskazania

Produkt wskazany jest do stosowania na rany powierzchniowe, zainfekowane lub z ryzykiem wystąpienia infekcji (np. rany przewlekłe, otarcia i skaleczenia, odleżyny, rany pooperacyjne).

#### Działanie

Opatrunek Inadine dzięki zawartości jodu, który jest stale uwalniany do łóżyska rany charakteryzuje się szerokim spektrum przeciwbakteryjnym (bakterie gram - i gram +, bakterie beztlenowe), eliminuje także zarodniki, grzyby, drożdżaki i wirusy. Długotrwałe stosowanie opatrunku nie powoduje u bakterii wytworzenia się oporności na jego działanie. Opatrunek nie przywiera do rany, więc nie powoduje bólu podczas jego usuwania.

#### Skład

Produkt wykonany został z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności, która impregnowana została glikolem polietylenowym zawierającym 10% jodopowidonu (1,0% dostępnego jodu).

#### Sposób użycia

1. Zdejmij papierowe warstwy ochronne.
2. Nałóż opatrunek na ranę.
3. Zastosuj opatrunek wtórny.
4. W celu usunięcia opatrunku delikatnie rozciągnij jego przeciwległe rogi.

#### Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jod, przed i po leczeniu izotopem jodu u chorych z zaburzoną czynnością nerek.



#### Właściwości

- Produkt jałowy, jednokrotnego użytku.
- Można go dowolnie przycinać - opatrunek nie strzępi się.

#### Uwagi

- Produkt jednokrotnego użytku.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

#### Producent

SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LTD  
Building 47, Charnwood Campus, 10 Bakewell Road,  
LE11 5RB Loughborough, England