

Inhalator Diagnostic Econstellation Plus, 1 sztuka

Cena: 203,24 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Inhalator
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Inhalator tłokowy Diagnostic Econstellation Plus to kompaktowe urządzenie medyczne przeznaczone do stosowania z lekami. Pozwala na natychmiastowe i bezpośrednie podanie preparatów farmaceutycznych w postaci inhalacji do oskrzeli i płuc. Inhalator wyposażony jest w innowacyjny inhalator z możliwością regulacji wielkości cząstek oraz możliwością pracy pod kątem. Efekt leczniczy jest dobry na górne drogi oddechowe, środkowe drogi oddechowe i dolne drogi oddechowe. Jest zatem idealny w walce z przeziębieniem, katarą, dokuczliwym kaszlem, alergiami, zapaleniem oskrzeli, zapaleniem oskrzelików i zapaleniem płuc. Aby wdychać określoną część dróg oddechowych, wystarczy włożyć do nebulizatora odpowiedni selektor cząstek i odpowiedni płat. To urządzenie jest odpowiednie do inhalacji przez dzieci i dorosłych.

Zastosowanie

- Zmontować zestaw do inhalacji. Należy zwrócić uwagę czy dostępne są wszystkie części.
- Napełnić komorę środkiem inhalacyjnym, pilnując by nie został przekroczony znak maksymalnego napełnienia komory.
- Połączyć zestaw inhalacyjny z przewodem powietrznym do kompresora i podłączyć wtyczkę do sieci (230V 50 Hz AC).
- Aby uruchomić urządzenie, należy ustawić przełącznik ON / OFF w pozycji «I».
- Zaleca się, aby w trakcie inhalacji siedzieć prosto i być zrelaksowanym. Nie należy leżeć podczas inhalacji. W razie pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwać inhalację.
- Po zakończeniu inhalacji, w czasie zalecanym przez lekarza, należy wyłączyć urządzenie. W tym celu powinno się ustawić przełącznik w pozycji «O» i odłączyć wtyczkę od zasilania.
- Na koniec, zestaw inhalacyjny należy opróżnić z resztek leku a samo urządzenie wyczyścić.

Przeznaczenie

Zwalczanie przeziębień, kataru, uciążliwego kaszlu, alergii, zapalenia oskrzeli, oskrzelików czy zapalenia płuc.

Ważne wskazówki

Przed użyciem produktu zawsze należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi dołączonej do opakowania.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

DIAGNOSIS S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok