

Inhalator DIAGNOSTIC Econstellation Plus

Cena: 170,62 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIAGNOSIS S.A.

Opis produktu

Opis

Inhalator tłokowy Diagnostic Econstellation Plus to kompaktowe urządzenie medyczne przeznaczone do stosowania z lekami. Pozwala na natychmiastowe i bezpośrednie podanie preparatów farmaceutycznych w postaci inhalacji do oskrzeli i płuc. Inhalator wyposażony jest w innowacyjny inhalator z możliwością regulacji wielkości cząstek oraz możliwością pracy pod kątem. Efekt leczniczy jest dobry na górne drogi oddechowe, środkowe drogi oddechowe i dolne drogi oddechowe. Jest zatem idealny w walce z przeziębieniem, katarą, dokuczliwym kaszlem, alergiami, zapaleniem oskrzeli, zapaleniem oskrzelików i zapaleniem płuc. Aby wdychać określoną część dróg oddechowych, wystarczy włożyć do nebulizatora odpowiedni selektor cząstek i odpowiedni płat. To urządzenie jest odpowiednie do inhalacji przez dzieci i dorosłych.

Zastosowanie

- Zmontować zestaw do inhalacji. Należy zwrócić uwagę czy dostępne są wszystkie części.
- Napełnić komorę środkiem inhalacyjnym, pilnując by nie został przekroczony znak maksymalnego napełnienia komory.
- Połączyć zestaw inhalujący z przewodem powietrznym do kompresora i podłączyć wtyczkę do sieci (230V 50 Hz AC).
- Aby uruchomić urządzenie, należy ustawić przełącznik ON / OFF w pozycji «I».
- Zaleca się, aby w trakcie inhalacji siedzieć prosto i być zrelaksowanym. Nie należy leżeć podczas inhalacji. W razie pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwać inhalację.
- Po zakończeniu inhalacji, w czasie zalecanym przez lekarza, należy wyłączyć urządzenie. W tym celu powinno się ustawić przełącznik w pozycji «O» i odłączyć wtyczkę od zasilania.
- Na koniec, zestaw inhalacyjny należy opróżnić z resztek leku a samo urządzenie wyczyścić.

Przeznaczenie

Zwalczanie przeziębień, kataru, uciążliwego kaszlu, alergii, zapalenia oskrzeli, oskrzelików czy zapalenia płuc.

Ważne wskazówki

Przed użyciem produktu zawsze należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi dołączonej do opakowania.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943