

Inhalator Novama FAMILINO by Flaem 1 sztuka

Cena: 228,57 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Inhalator
Producent	NOVAMED SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Inhalator tłokowy **Novama Familino by Flaem** jest przeznaczony do użytku przez całą rodzinę. Umożliwia on dostarczanie leków wziewnych bezpośrednio do dolnych dróg oddechowych.

Wskazania

Produkt wskazany jest do podawania drogą wziewną soli fizjologicznej, soli fizjologicznej z kwasem hialuronowym, hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej oraz większości leków do nebulizacji. Tryb "większych cząsteczek" zalecany jest, jeśli istnieje potrzeba dostarczenia leku do oskrzeli, oskrzelików i tchawicy. W przypadku konieczności dostarczenia leku do pęcherzyków płucnych poleca się tryb "małych cząsteczek"

Przeznaczenie

Inhalator przeznaczony jest do podawania drogą wziewną produktów leczniczych oraz innych substancji i umożliwia ich łatwe dostarczenie do dolnych dróg oddechowych.

Sposób użycia

1. Dokładnie umyć i osuszyć ręce, wyczyścić urządzenie.
2. Podłączyć urządzenie do prądu, umieścić lek (w ilości wskazanej przez lekarza) w dolnej części nebulizatora. W przypadku wyboru trybu "małych cząsteczek" należy włożyć dodatkowo rurkę przełącznika.
3. Zamontuj nebulizator i podłącz wybrane akcesoria.
4. Usiądź wygonie, załóż maskę, bądź przytóż ustnik/nakładkę donosową do ust/nosa.
5. Włącz kompresor, wykonuj głębokie wdechy i wydechy. Zaleca się, aby po wdechy zatrzymać na chwilę oddech.
6. Po zakończeniu inhalacji wyłącz urządzenie, odłącz je od prądu i wyczyść.

Przeciwwskazania

- Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania z mieszkankami anestetycznymi, które w kontakcie z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu stają się łatwopalne.

- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi, nie używać w wilgotnym środowisku (np. w trakcie kąpieli).
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne, zawsze sprawdzaj czy nie są one zatkane.
- Czas przejścia ze stanu przechowywania do stanu roboczego wynosi 2 godziny.
- Filtr powietrza należy wymienić na nowy gdy się zabrudzi lub żółknie.

Uwagi

- Średni okres eksploatacji akcesoriów wynosi 1 rok, a w przypadku intensywnego używania należy wymieniać nebulizator co 6 miesięcy lub wcześniej - jeśli ulegnie zatkaniu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Chronić przed kurzem, wodą, źródłami ciepła, ekstremalnymi temperaturami i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Producent

FLAEM NUOVA