

Inhalator Sanity, siateczkowy Silent Mesh, model AP 2717 PRO, 1 sztuka

Cena: 14,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Inhalator
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Silent Mesh to nowoczesny inhalator siateczkowy, zaprojektowany z myślą o całej rodzinie. Umożliwia skuteczne i komfortowe podawanie leków bezpośrednio do dróg oddechowych – niezależnie od pozycji ciała, co sprawia, że inhalacja jest możliwa nawet w pozycji leżącej.

Wskazania

Terapia wziewna dla całej rodziny zalecana jest w przypadku wystąpienia infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, przewlekłego nieżytu nosa oraz gardła, przeziębienia, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), alergii, nawracającego zapalenia płuc i stanów po zapaleniu płuc, przewlekłego i nawracającego zapalenia oskrzeli, mukowiscydozy, chronicznego bronchitu oraz w stanach pooperacyjnych.

Przeznaczenie

Inhalator SILENT MESH przeznaczony jest do podawania leków w formie aerozolu. Znajdzie on także zastosowanie w codziennej profilaktyce łagodzenia i nawilżania śluzówki i gardła.

Sposób użycia

Wlewanie leku: otworzyć pojemnik, wlać lek, zamknąć pojemnik. Nie wlewać większej objętości niż 8 ml.

Inhalacja: podłączyć maskę inhalacyjną, bądź ustnik. Trzymając jednostkę główną rozpocząć inhalację. W trakcie pracy urządzenia przycisk zasilania będzie miarowo migać. Zgromadzoną w miejscu mocowania maski ślinę/substancję leczniczą należy usunąć za pomocą gazy.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować NEBU-DOSE HIALURONIC, NEBU-DOSE HIPERTONIC, substancji oleistych, tłustych, estrów i zawiesin (ekstraktów z ziół, płynów dyfuzyjnych).



Uwagi

- Nie należy wtykać wacików ani szpilek do metalowej siateczki. Grozi to jej uszkodzeniem.
- Aby zapobiec rozwojowi bakterii po każdym użyciu zaleca się dokładnie wyczyścić inhalator za pomocą wody destylowanej.
- Nie używać urządzenia przy pustym pojemniku na lekarstwo.
- Produkt użytku osobistego. Użytkowanie przez więcej niż jedną osobę niesie ryzyko infekcji.
- Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Producent

ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce