

## InVag, żel ginekologiczny, 30 g



Cena: 14,67 zł

### Opis słownikowy

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet                           |
| Opakowanie      | 30 g                                 |
| Postać          | Żel                                  |
| Producent       | IBSS BIOMED S.A.                     |
| Przeznaczenie   | Łagodzące, Nawilżające, Wspomagające |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                       |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów          |

### Opis produktu

#### Opis

**InVag** to medyczny preparat w formie żelu ginekologicznego, przeznaczony dla kobiet zmagających się z nawracającymi infekcjami intymnymi – zarówno grzybiczymi, jak i bakteryjnymi – oraz dla tych, które mają tendencję do zaburzeń równowagi naturalnej flory bakteryjnej. Produkt nie zawiera PEG, parabenów ani detergentów, takich jak SLS i SLES.

#### Wskazania

Wyrób można stosować na co dzień lub doraźnie:

- wspomagająco, podczas leczenia zakażeń okolic intymnych (o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym);
- w celu utrzymania równowagi mikroflory okolic intymnych oraz fizjologicznego, kwaśnego pH;
- łagodząco, przy objawach zakażenia okolic intymnych (pieczenia, świądu, dyskomfortu w obrębie zewnętrznych narządów płciowych).

#### Skład

- Składniki aktywne: metabolity bakterii *Lactobacillus*
- Pozostałe składniki: woda, glikol propylenowy, gliceryna, hydroksypropylometyloceluloza, alkohol fenyloetylowy, glikol kaprylowy, kompozycja zapachowa.

#### Stosowanie

Zazwyczaj wystarczy jedna aplikacja na dobę. W razie potrzeby, żel można stosować 2-3 razy dziennie.

#### Przeznaczenie

Do wspomagania leczenia pierwotnych i wtórnych zakażeń okolic intymnych.

#### Sposób użycia

Nałożyć cienką warstwę InVag na okolice krocza i zewnętrznych narządów płciowych. Żel należy nakładać od przodu, kierując się stroną



odbytu.

#### **Właściwości**

Wyrób medyczny InVag żel polecany jest szczególnie pacjentkom podatnym na zakażenia okolic intymnych. Jego stosowanie wspomaga leczenie i łagodzi skutki infekcji. Składniki zawarte w preparacie utrzymują fizjologiczne (kwaśne) pH. Przeciwgrzybicze właściwości chronią przed rozwojem *Candida albicans* i *Candida glabrata*, zaś przeciwbakteryjne ograniczają rozwój *Gardnerella vaginalis*, *Escherichia coli*, *Prevotella bivia* i *Streptococcus agalactiae*. Żel jest komfortowy w użytkowaniu, nie brudzi bielizny, a dzięki specjalnej konsystencji zapewnia długie nawilżenie.

#### **Ostrzeżenia**

- Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

#### **Producent**

BIOMED KRAKOW