

# Irigasin Junior Wyrób medyczny zestaw do płukania nosa i zatok 12,96 g (12 x 1,08 g)



Cena: 25,17 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	12 saszetek (+ irygator)
Postać	Roztwór
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka, Od 4 lat

## Opis produktu

### Opis

**Irigasin Junior** to przyrząd medyczny przeznaczony do płukania nosa i zatok u dzieci powyżej 4 roku życia. Zestaw umożliwia przygotowanie dwóch rodzajów roztworów: izotonicznego i hipertonicznego, w zależności od indywidualnych potrzeb.

### Składniki

Chlorek sodu.

### Sposób użycia

- Przygotuj roztwór do płukania: izotoniczny - wsyp 1 saszetkę do irygatora i uzupełnij przegotowaną, ostudzoną wodą do linii 120 ml; hipertoniczny - wsyp 2 saszetki do irygatora i uzupełnij przegotowaną, ostudzoną wodą do linii 120 ml.
- Zakręć butelkę, palcem zakryj otwór i dokładnie wymieszaj zawartość (do uzyskania jednolitego, klarownego roztworu).
- Ustaw dziecko w pozycji lekko pochylonej nad umywalką/wanną/miską. Dziecko powinno oddychać za pomocą ust.
- Przyłóż końcówkę do jednej dziurki nosa i płynnym ruchem ściśnij butelkę i wprowadź do noska połowę przygotowanego roztworu. Płyn wraz z wydzieliną wypłynie drugą dziurką nosową.
- Czynność powtórz z drugą rurką.
- Po zakończonej procedurze dziecko powinno delikatnie wydmuchać nos. Niewykorzystany roztwór należy wylać.

### Przeciwwskazania

- W przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu zaprzestać stosowania produktu.
- Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa oraz podczas infekcji lub uczucia zatkania ucha

### Ostrzeżenia

- W przypadku przebytej operacji ucha należy skonsultować się z lekarzem przed wykonaniem płukania nosa i zatok.

- Jeśli objawy nieżyty nosa i zatok się nasilają należy skonsultować się z lekarzem.
- Przez minimum godzinę od wykonania irygacji dziecko nie powinno się kłaść - może to spowodować przedostanie się pozostałości roztworu do uszu.

#### Producent

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  
95-200 Pabianice  
ul. Partyzancka 133/151

#### Galeria

