

IriGO Zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, 30 saszetek

Cena: 16,38 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 saszetek
Postać	Proszek
Producent	SILESIA PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

IriGO Zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok to wyrób medyczny zawierający rozpuszczalny chlorek sodu, który pozwala na przygotowanie izotonicznego lub hipertonicznego roztworu do płukania nosa i zatok. Zestaw ten oczyszcza i udrażnia nos oraz zatoki, usuwając nadmiar wydzieliny i zalegający śluz, co zmniejsza ryzyko gromadzenia się czynników sprzyjających powstawaniu i rozwojowi infekcji.

Wskazania

- IriGO Zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok stosuje się w celu zapobiegania i objawowego wspomagania leczenia nosa i zatok w przebiegu zapalenia zatok przynosowych oraz nieżytu nosa o różnym pochodzeniu.
- Wyrób medyczny jest polecany w celu utrzymania prawidłowej higieny zatok i nosa, jak również przed i po zabiegach chirurgicznych jamy nosa lub zatok.

Działanie

IriGO Zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok to wyrób medyczny, który zawiera rozpuszczalny chlorek sodu do sporządzenia izotonicznego lub hipertonicznego roztworu stosowanego do płukania nosa oraz zatok. IriGO Zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok oczyszcza i udrażnia nos oraz zatoki. Wyrób medyczny usuwa nadmiar wydzieliny oraz zalegającego śluzu, przez co ogranicza ryzyko gromadzenia się czynników sprzyjających powstawaniu i rozwojowi infekcji w obrębie nosa i zatok.

Dawkowanie

- Produkt jest bezpieczny i może być używany przez dzieci od 6. roku życia. Dzieci mogą stosować wyrób wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej.
- Płukanie nosa i zatok przy użyciu wyrobu medycznego IriGO należy przeprowadzać 1 do 3 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.



- Profilaktycznie irygację stosuje się 2 do 3 razy w tygodniu. Po przeprowadzeniu płukania nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temperaturze poniżej 19 C) przez około godzinę. Płukanie powinno się przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem. Za każdym razem przed przystąpieniem do płukania sprawdzić, czy temperatura wody jest odpowiednia.

Skład

Chlorek sodu Ph. Eur.

1 saszetka wyrobu medycznego zawiera 2,16 g chlorku sodu.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku otwartych, niezagojonych ran w nosie, w szczególności po operacjach laryngologicznych.

Producent

SILESIA PHARMA