

KaliDrop Free, krople do oczu z jodkiem potasu, bez konserwantów, 10 ml



Cena: 19,92 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	SUPROBION SP.Z O.O.SP.K.
Przeznaczenie	Nawilżające, Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

KaliDrop Free to sterylne krople do oczu bez dodatku konserwantów, dostępne w opakowaniu 10 ml. Zawierają jodek potasu oraz hialuronian sodu, a ich działanie polega na nawilżaniu powierzchni oka oraz wspomaganiu profilaktyki zmętnień soczewki i ciała szklanego.

Wskazania

Krople stosuje się w celu nawilżania powierzchni oka oraz w profilaktyce zmętnień soczewki i ciała szklanego oka.

Działanie

- Nawilżają powierzchnię oka.
- Sprawdzają się w profilaktyce zmętnień soczewki i ciała szklanego oka.

Skład

Hialuronian sodu 1 mg/ml, jodek potasu 5 mg/ml, kwas borowy, tetraboran sodu, chlorek sodu, woda wysokooczyszczona.

Stosowanie

Krople do oczu KaliDrop Free należy stosować tylko zewnętrznie do worka spojówkowego. Mogą być używane codziennie, także przez użytkowników wszystkich typów soczewek kontaktowych. Zwykle zakrapla się 3 - 4 razy dziennie po jednej kropli do worka spojówkowego każdego oka. Przy nasilonych dolegliwościach można zakraplać częściej.

Sposób użycia

- Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce.
- Przed każdym użyciem należy zdjąć osłonkę zabezpieczającą. Nie dotykać końcówki zakraplacza.

- Lekko odchylić głowę do tyłu.
- Butelkę trzymać otworem do dołu (pionowo).
- Dolną powiekę odciągnąć nieco do dołu, naciskając butelkę wkropić jedną kroplę do worka spojówkowego.
- Po zakropleniu należy zamknąć powieki i ruszając gałką oczną, rozprowadzić krople na powierzchni oka.
- Te same czynności powtórzyć dla drugiego oka.
- Po użyciu należy założyć osłonkę zabezpieczającą na zakraplacz. Podczas zakraplania trzeba uważać, by nie dotknąć końcówką zakraplacza powierzchni oka oraz powieki.
- Po zastosowaniu preparatu nie zakraplać/płukać powierzchni oka wodą, ani żadnym innym płynem.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu.
- Nie stosować w przypadku bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych infekcji oka.

Uwagi

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu.
- Od daty pierwszego otwarcia, stosować nie dłużej niż 30 dni w sposób ciągły i nie dłużej niż 90 dni w sposób nieciągły (uwzględniając kilkudniowe przerwy podczas aplikacji).
- Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.
- Preparat przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nigdy nie dotykać końcówką zakraplacza oka lub innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie roztworu.
- Wyrób medyczny do wielokrotnego użytku powinien być stosowany wyłącznie przez jedną osobę.

Producent

SUPROBION Sp. z o.o., Sp. k.
Kiełczowska 2
55-095 Mirków