

Katarek Travel 2w1 1 sztuka

Cena: 88,86 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	KATAREK
Opakowanie	1 sztuka
Postać	-
Producent	DUNA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Akcesoria
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka

Opis produktu

Opis

Katarek Travel stanowi wszechstronne rozwiązanie 2w1 do ssania wydzielin z jamy ustnej i zastosowania w połączeniu z odkurzaczem, dedykowane dla dzieci od pierwszego dnia życia. Używanie tego aspiratora jest istotne, ponieważ zalegająca wydzielina może wywoływać nieprzyjemne dolegliwości oraz prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych związanych z nosem, uszami, gardłem i drogami oddechowymi. Wersja do podłączenia do odkurzacza doskonale radzi sobie z gęstym i zalegającym katarzem. W sytuacjach podróży, podczas spacerów, kiedy korzystanie z odkurzacza jest niemożliwe, pomocna jest wersja ustna aspiratora, która sprawdzi się również w codziennej pielęgnacji. Praktyczne opakowanie w formie kosmetyczki umożliwia wygodne podróżowanie, a do niej można również włożyć kilka ampułek soli fizjologicznej Katarek oraz maść nawilżającą do nosa z prebiotykiem.

Zastosowanie

Usuwanie wydzieliny z nosa u dzieci.

Sposób użycia

- Odciąganie przy użyciu odkurzacza: należy podłączyć do aspiratora końcówkę do noska i końcówkę do odkurzacza. Stożkowy koniec należy włożyć do rury ssącej włączonego odkurzacza o mocy 800 - 18000 W. Niemowlę należy wziąć na ręce lub położyć/posadzić na kolanach. Końcówkę do noska umieścić tak aby całkowicie zablokowała jedno nozdrze, odciągać zalegającą wydzielinę. Aspiracja nie powinna trwać dłużej niż 5 sekund a jedną dziurkę. Czynność powtórzyć z drugą dziurką. Po zakończonej aspiracji należy wyłączyć odkurzacza i umyć aspirator pod bieżącą, gorącą wodą.
- Odciąganie ustne: należy podłączyć do aspiratora końcówkę do noska i ustnik. Niemowlę wziąć na ręce lub położyć/posadzić na kolanach. Końcówkę do noska należy umieścić tak aby całkowicie zablokowała jedno nozdrze, ustnik wziąć do ust i odciągnąć zalegającą wydzielinę. Czynność powtórzyć z drugą dziurką. Po zakończonej aspiracji należy wyłączyć odkurzacza i umyć aspirator pod bieżącą, gorącą wodą.

Przeciwwskazania



- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- W przypadku hemofilii lub częstego krwawienia z nosa skonsultuj się z lekarzem.
- Używaj odkurzacza o mocy 800-1800 W (bezpieczne użytkowanie jest potwierdzone testami). Zapoznaj się z instrukcją obsługi odkurzacza.
- Nie używaj innych detergentów, środków chemicznych ani materiałów ściernych.

Producent

Illés Csók és Társa Kft.
Budapest H-1146
Ajtósi Dürer sor 35