

# Keto-Diastix test paskowy 50 sztuk



Cena: 18,24 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 pasków
Postać	Test paskowy
Producent	BAYER CONSUMER CARE AG
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Paski testowe **Keto-Diastix** do badania moczu to produkt medyczny stworzony do samokontroli obecności glukozy i ciał ketonowych w moczu. Przeznaczony jest do użytku domowego, umożliwiając szybkie i wygodne monitorowanie tych parametrów, co jest szczególnie istotne dla pacjentów z cukrzycą. Interpretacja wyniku polega na porównaniu uzyskanej barwy paska z dołączoną do opakowania skalą barwną. W zdrowym organizmie glukoza i ciała ketonowe nie powinny być obecne w moczu.

### Zastosowanie

Wykrywanie związków ketonowych i ilościowe oznaczanie poziomu glukozy w moczu.

### Sposób użycia

- Pobrać próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika i przeprowadzić badanie możliwie jak najszybciej (ewentualnie test paskowy można umieścić pod strumieniem świeżego moczu).
- Po 15 sekundach od zwilżenia paska moczem odczytać zawartość ciał ketonowych porównując kolor otrzymany na pasku z polami barwnymi umieszczonymi na butelce.
- Po 30 sekundach od zwilżenia paska moczem odczytać zawartość glukozy porównując kolor otrzymany na pasku z polami barwnymi umieszczonymi na butelce.
- W przypadku gdy badanie wykaże średnią lub wysoką zawartość ciał ketonowych w moczu, należy skontaktować się z lekarzem.

### Ostrzeżenia

- Wyrób medyczny Keto-Diastix należy przechowywać w temperaturze 15-30oC.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
- Nie przechowywać w lodówce!
- Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia do opakowania.
- Nie usuwać środka osuszającego z butelki!
- Po każdym wyjęciu paska należy od razu, szczelnie zamykać buteleczkę.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

**Producent**

Bayer Consumer Care AG  
Peter Merian-Strasse 84  
4052 Basel, Switzerland