

Kick the Tick Expert, zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy, 9 ml



Cena: 56,49 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Spray
Producent	ICB PHARMA SP.J.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Kick The Tick Expert to zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy, przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy w przypadku ukąszenia przez kleszcze. Zawiera specjalistyczny preparat zamrażający pasożyta i hamujący wydzielanie jego śliny oraz narzędzie do jego usuwania. Produkt jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia, a także może być stosowany do usuwania kleszczy u zwierząt.

Wskazania

Kick The Tick Expert jest zalecany do stosowania w celu ograniczenia ryzyka zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze takimi jak: kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, babeszjoza, anaplazmoza i inne.

Działanie

Zastosowanie wyrobu powoduje zamrożenie i zahamowanie wydzielania zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza. Wykorzystana w preparacie technologia APRF (ang. Anti-Parasite Removal Film) tworzy trwałą powłokę, która zapobiega uszkodzeniu kleszcza podczas jego usuwania, co minimalizuje ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym. Dołączony do zestawu przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick® ułatwia sprawne i bezpieczne usunięcie pasożyta, co dodatkowo ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.

Skład

Izoheksadekan, mirystynian izopropylu, 1,1,1,2-tetrafluoroetan.

Sposób użycia

Zabieg usuwania żerującego kleszcza należy wykonać bardzo starannie, korzystając z odpowiednio wybranej końcówki (A lub B) przyrządu.

Wybór końcówki przyrządu należy dostosować do rozmiaru żerującego kleszcza (larwa/nimfa lub samica). Końcówka A nadaje się dla pasożytów wielkości od 0,8 mm do 1,5 mm, natomiast końcówka B od około 3,5 mm do 5 mm.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia wyrobu. Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie stosować na skórę zmienioną chorobowo.
- Nie stosować w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Unikać kontaktu wyrobu z oczami, okolicami oczu, błonami śluzowymi ust i nosa oraz okolicami intymnymi.
- Nie wdychać.
- Zastosowanie zbyt dużej dawki wyrobu może spowodować zaczerwienienie skóry. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu a następnie przemyć skórę dużą ilością ciepłej (nie gorącej!) wody i osuszyć. W razie utrzymujących się zmian na skórze (zbiełnienie lub zaczerwienienie, obrzęk, ból) należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
- Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego.
- Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 40°C.
- Zestaw zawiera pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Uwagi

W przypadku, jeżeli kleszcz jest wczepiony w miejscu uniemożliwiającym jego samodzielne usunięcie (okolice pachwiny, pachy, za małżowinami usznymi, dół podkolanowy), zaleca się, aby zabieg został wykonany przy pomocy osób trzecich.

Po wykonanym zabiegu usunięcia kleszcza należy obserwować miejsce wklucia przez kilka tygodni

Nieostrożne wykonanie zabiegu może spowodować rozerwanie kleszcza i zwiększyć ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym.

W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z kleszczem zaleca się wykonywanie zabiegu w rękawicach ochronnych.

W przypadku późnego zauważenia żerującego pasożyta następuje trwałe umocowanie narządów gębowych, co utrudnia jego usuwanie. Pozostałe w skórze fragmenty ciała kleszcza powinien usunąć lekarz.

Producent

ICB PHARMA
Moździerzowców 6a
Jaworzno

Galeria

