

Kick the Tick, przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy, 1 sztuka



Cena: 18,82 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	KICK THE TICK
Opakowanie	1 sztuka
Postać	-
Producent	ICB PHARMA SP.J.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

KICK THE TICK to przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy, ograniczający możliwość transmisji czynników zapalnych podczas zabiegu. Jest to wyrób medyczny, dostępny w jednym egzemplarzu.

Wskazania

KICK THE TICK jest zalecany do stosowania w celu ograniczenia ryzyka zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze takimi jak: kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, babeszjoza, anaplazmoza i inne.

Działanie

KICK THE TICK:

- do udzielenia pierwszej pomocy w przypadkach zaatakowania przez kleszcze.
- kształt jest dostosowany do budowy kleszcza
- umożliwia sprawne i samodzielne usuwanie żerującego pasożyta.

Zastosowanie

- Ogranicza ryzyko zakażenia.
- Stosowany w profilaktyce chorób odkleszczowych, m.in.: boreliozy, kleszczowego zapalenia mózgu, babeszjozy, anaplazmy.
- Można stosować u dzieci od 3 roku życia.

Sposób użycia

- Zabieg usuwania żerującego kleszcza należy wykonać bardzo starannie, korzystając z odpowiednio wybranej końcówki (A lub B)

przyrządu.

- Wybór końcówki przyrządu należy dostosować do rozmiaru żerującego kleszcza (larwa/nimfa lub samica)

Ostrzeżenia

- Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji używania.
- W przypadku stosowania wyrobu u dzieci zabieg należy przeprowadzać pod kontrolą osoby dorosłej.
- Po użyciu wyrób należy zdezynfekować.
- Nie używać wyrobu w przypadku jego uszkodzenia.
- Zachować ostrożność.
- Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania.
- Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w oryginalnym opakowaniu.

Uwagi

- Nieostrożne wykonanie zabiegu może spowodować rozerwanie kleszcza i zwiększyć ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym.
- W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z kleszczem zaleca się wykonywanie zabiegu w rękawicach ochronnych.
- W przypadku późnego zauważenia żerującego pasożyta następuje trwałe umocowanie narządów gębowych, co utrudnia jego usuwanie. Pozostałe w skórze fragmenty ciała kleszcza powinien usunąć lekarz.
- Po wykonaniu zabiegu usunięcia kleszcza należy obserwować miejsce wkłucia przez kilka tygodni.

Producent

ICB PHARMA
Moździerzowców 6a
Jaworzno

Galeria

