

KLESZCZ OUT - Przyrząd do usuwania kleszczy



Cena: 33,25 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ALBERT POLSKA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Przyrząd do usuwania kleszczy
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Kleszcz Out to przyrząd do usuwania kleszczy, to wyrób medyczny, w formie pompki, do usuwania kleszczy lub jadu innych owadów. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, można go używać samodzielnie w warunkach domowych. Pompka jest zakończona gumką uszczelniającą, w której po zaciągnięciu wytwarza się podciśnienie i kleszcz zostaje zassany. Pozwala to na usunięcie kleszcza w całości, co zmniejsza ryzyko zarażenia boreliozą lub kleszczowym zapaleniem mózgu. Produktu należy używać tylko w miejscach, gdzie jest możliwość wytworzenia próżni.

Zastosowanie

Wyrób służy do usuwania kleszczy z ciała człowieka. Może także służyć do usuwania jadu po ukąszeniach owadów, żmij i skorpionów. Polecany przy udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Sposób użycia

- Wciskanie tłoka: Naciśnij gumowy tłok przyrządu do momentu oporu.
- Przyłożenie końcówki: Umieść końcówkę przyrządu na skórze w miejscu, gdzie kleszcz się przyczepił, czyli tam, gdzie wstrzyknął jad.
- Docisk do ciała: Delikatnie dociskając przyrząd do skóry, powoli przesuwaj tłok w kierunku odpowiedniej pozycji.
- Utrzymanie pozycji: Trzymając docisk, utrzymaj przyrząd w tej pozycji przez 10-15 sekund, zapewniając odpowiednią penetrację.
- W razie potrzeby powtórz: Jeśli to konieczne, możesz powtórzyć cały proces, aby upewnić się, że kleszcz został usunięty kompletnie.
- Zdezynfekowanie miejsca: Po usunięciu kleszcza, zdezynfekuj miejsce ukąszenia za pomocą środków odkażających.
- Przemywanie i dezynfekcja: Po użyciu, przemyj końcówkę przyrządu wodą z mydłem i zdezynfekuj ją odpowiednim środkiem odkażającym.

Przeciwwskazania



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie używać przyrządu na zranionej skórze, w okolicach oczu, na zewnętrznych narządach płciowych.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Producent

ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
Dobczyce