

Koc ratunkowy srebrno-złoty 210 x 160 cm PASO, 1 sztuka

Cena: 10,81 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PASO
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Koc ratowniczy
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Koc ratunkowy termoizolacyjny jest wykorzystywany w ratownictwie do ochrony organizmu przed wychłodzeniem lub przegrzaniem.

Sposób użycia

Koc należy rozłożyć na całą szerokość i dokładnie owinać nim poszkodowanego, końcem zalepić taśmą, plastrem lub zawiązać. Twarz musi pozostać odkryta. Jeśli jest zimno rannego okrywamy srebrną powierzchnią do ciała, jeśli jest gorąco powierzchnią złotą do ciała.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Zabrania się stosowania koca w przypadku, gdy osoba poszkodowana ma kontakt z jakimkolwiek urządzeniami znajdującymi się pod napięciem elektrycznym.
- Wyrób medyczny niejałowy - nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne wskazówki

Zabrania się stosowania koca w przypadku, gdy osoba poszkodowana ma kontakt z jakimkolwiek urządzeniami znajdującymi się pod napięciem elektrycznym.

Producent

Taizhou Xinkang Medical Materials Co., Ltd
No. 18, Wuzhou (South) Road, 225300 Taizhou, Jiangsu, Chiny



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943