

Komora inhalacyjna Babyhaler dla dzieci, 1 sztuka

Cena: 178,12 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	1 sztuka
Postać	-
Producent	GSK SERVICES SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, Astma, Grypa, Infekcja, Kaszel, Katar, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Komora inhalacyjna Babyhaler dla niemowląt i dzieci to medyczne urządzenie przeznaczone do podawania leków w formie aerozoli wziewnych pod ciśnieniem. Umożliwia precyzyjne podanie odpowiedniej dawki leku dziecku. Wyposażona jest w maseczkę zakładaną na nos i usta malucha.

Działanie

Komora inhalacyjna dla dzieci Babyhaler jest urządzeniem ułatwiającym dzieciom stosowanie leków w postaci aerozoli do inhalacji, pod ciśnieniem.

Sposób użycia

Dzieci i niemowlęta:

- trzeba włożyć przygotowany inhalator z lekiem do komory, tak aby ustnik był skierowany w jej głąb
- podczas trzymania poziomo komory Babyhaler, przycisnąć dozownik inhalatora i szybko dołożyć maseczkę do buzi dziecka, odczekać aż wykona 5-10 wdechów,
- następnie możemy odłożyć komorę inhalacyjną, lub podać kolejną dawkę leku, jeśli mamy przepisanych przez lekarza ich więcej
- po zakończeniu podawania leku, trzeba wyjąć i zabezpieczyć inhalator z lekiem

Ostrzeżenia

- Ze względów higienicznych Komora inhalacyjna Babyhaler dla dzieci powinna być używana tylko przez jedną osobę
- Używać i przechowywać, tylko zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania
- Chronić przed uszkodzeniem przez dzieci

Producent

GLAXOSMITHKLINE



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943