

Kompres żelowy ciepło-zimno APTEO, 10 cm x 26,5 cm, 1 sztuka

Cena: 23,80 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	kompres
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Naturalna metoda łagodzenia bólu, przeznaczona do wielokrotnego użytku, zawiera bezpieczny i nietoksyczny żel, ma zaokrąglone brzegi oraz miękki, przyjemny w dotyku pokrowiec.

Wskazania

Kompres żelowy ciepło/zimo APTEO CARE:

- do wielokrotnego użytku
- przeznaczony do schładzania lub ogrzewania różnych partii ciała
- zawiera bezpieczny, nietoksyczny żel
- posiada zaokrąglone bezpieczne rogi
- posiada miękki pokrowiec

Skład

1 kompres, 1 pokrowiec oraz instrukcja używania.

Sposób użycia

Jeżeli odczuwany jest dyskomfort, zarówno w terapii ciepłem, jak i zimnem, należy niezwłocznie zdjąć okład.

Ostrzeżenia

- Tylko do użytku zewnętrznego, stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Sprawdzić szczelność przed użyciem,
- Nie stosować bezpośrednio na skórę zimnego ani ciepłego kompresu, należy użyć pokrowca lub owinąć w ręcznik lub w czystą ściereczkę. Gorący okład bez użycia pokrowca może spowodować poparzenia,

- Należy stosować ostrożnie aby uniknąć urazów tkanki np. odmrożeń przy nieprzerwanym stosowaniu zimnego okładu powyżej 20 min,
- Stosowanie u dzieci tylko pod opieką dorosłych,
- Stosowanie przez starsze osoby z zaburzeniem krążenia kompresów zimnych tylko po konsultacji z lekarzem,
- Nie stosować na otwarte rany,
- Nie stosować podczas snu,
- Nie przekłuwać,
- Unikać silnego nacisku aby nie spowodować pęknięcia.
- Pomimo że żel jest nietoksyczny, nie wkładać do ust ani nie spożywać.
- Nie podgrzewać w piekarniku, na grillu lub otwartym ogniu.
- Przegrzanie okładu może spowodować jego uszkodzenie.
- Jeżeli odczuwany jest dyskomfort, zarówno w terapii ciepłem, jak i zimnem, należy niezwłocznie zdjąć okład.

Producent
SYNOPTIS PHARMA