

LabHome Calprotectin'Alert, szybki test na wykrywanie kalprotektyny w kale, 1 sztuka

Cena: 55,90 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LABHOME
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

LabHome Calprotectin'Alert to szybki test immunologiczny służący do wykrywania kalprotektyny w kale, gdy jej stężenie przekracza 50 µg na gram próbki.

Zastosowanie

Test diagnostyczny do samodzielnego wykonania w celu wykrycia obecności kalprotektyny w kale.

Sposób użycia

- Odkręć białą nakrętkę butelki z roztworem, na której przymocowana jest końcówka do pobrania próbki.
- Pobierz próbkę, zanurzając końcówkę w trzech różnych miejscach kału (próbki kału muszą być pobrane przy użyciu dedykowanej papierowej podkładki zawartej w zestawie).
- Przenieś zebraną próbkę kału do butelki z roztworem i dokładnie zakręć butelkę.
- Wstrząsaj butelką przez 10 sekund, tak by próbka kału rozpuściła się w roztworze.
- Rozerwij aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi i wyjmij płytkę testową.
- Wyrzuć saszetkę z pochłaniaczem wilgoci.
- Złam fioletową końcówkę dozującą w butelce.
- Trzymając pionowo butelkę, ściśnij ją i dodaj 5 kropli rozcieńczonej próbki kału do dołka próbkowego. Unikaj pęcherzyków powietrza.
- Odczytaj wynik testu po upływie 10 minut od dodania próbki kału do dołka próbkowego.
- Nie interpretuj wyniku testu po upływie 15 minut.

Ważne wskazówki



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Calprotectin'Alert to test przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie używać testu ponownie.
- Test należy przechowywać w temperaturze od 4 do 30°C.

Producent

VEDALAB

Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau, Cerisé, B.P. 181
61006 ALENCON Cedex, Francja