

LabHome Strep A'Lert, test z wymazu z gardła do wykrywania anginy bakteryjnej i szkarlatyny, 1 sztuka

Cena: 38,50 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LABHOME
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Strep A'lert to specyficzny, szybki test immunodiagnostyczny służący do wykrywania paciorkowca grupy A (*Streptococcus pyogenes*) w przypadku infekcji gardła. Ten wyrób medyczny do samokontroli pomaga ustalić, czy ból gardła jest spowodowany przez Strep A, czy inne patogeny (zazwyczaj wirusy), które nie wymagają leczenia antybiotykami.

Zastosowanie

- Test z wymazu z gardła do wykrywania paciorkowca beta-hemolizującego grupy A (angina).
- Wyrób medyczny do samokontroli w warunkach domowych.

Sposób użycia

- Przed wykonaniem testu zapoznaj się z instrukcją dołączoną do opakowania. Wynik testu jest wiarygodny tylko wówczas, gdy instrukcja jest ściśle przestrzegana.
- Test wykonuje się z wymazu pobranego z gardła i migdałków za pomocą wymazówki z bawełnianą końcówką.
- Pobranie materiału do badania jest nieinwazyjne i bezbolesne, dlatego jest również stosowane u dzieci.
- Odczyt wyniku możliwy jest już po 5-10 minutach. Nie należy odczytywać testu po upływie 10 minut.
- Pozytywny wynik testu oznacza, że w próbce wymazu z gardła wykryto antygeny bakterii *S.pyogenes* i infekcja ma podłoże bakteryjne – wskazana jest konsultacja z lekarzem.
- Wynik negatywny przemawia za zapaleniem gardła o podłożu wirusowym.
- Wynik jest nieważny, jeśli bliżej niebieskiej końcówki paska testowego nie pojawia się czerwona linia kontrolna. Test powinien być powtórzony z użyciem nowego testu oraz nowej próbki wymazu z gardła.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Ważne wskazówki

- Test jednorazowego użytku.
- Wyrób medyczny do samokontroli – przed wykonaniem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
- Przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zamrażać.
- Nie należy używać u dzieci poniżej 2 roku życia.

Producent

VEDA.LAB
Rue de l'Expansion
61000 Cerise, France