

LabHome Syph-Check-1, test z krwi do wykrywania przeciwciał T. pallidum, diagnostyka kiły, 1 sztuka

Cena: 52,82 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

SYPH-Check to wyrób medyczny do samodzielnego wykonania w domu, który służy do wykrywania przeciwciał przeciwko *Treponema pallidum* w krwi pobranej z nakłucia palca.

Zastosowanie

Wykonanie test jest zalecane:

- u osób z grupy podwyższonego ryzyka:
- w przypadku wystąpienia objawów takich jak: zmiany w obrębie narządów płciowych (wysypka na wargach sromowych, zaczerwieniony żołądź, wysypka na penisie), owrzodzenia na wargach sromowych, odciecie oraz jamie ustnej, rany na wargach sromowych, swędzenie po stosunku, pieczenie i dyskomfort przy oddawaniu moczu, pogorszenie słuchu, wzorku, powiększenie węzłów chłonnych.

Sposób użycia

- Przystępując do wykonania testu, wyjmij całą zawartość kartonowego opakowania.
- Dokładnie umyj ręce.
- Rozerwij aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi, a następnie wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę.
- Dociśnij mocno mały pomarańczowy element nakłuwacza i przekręć 3 razy w prawo lub w lewo, po czym go wyciągnij.
- Otwórz saszetkę ze środkiem dezynfekującym, wyjmij go i zdezynfekuj opuszek palca, najlepiej wskazującego, środkowego lub serdecznego.
- Aby zwiększyć ukrwienie, pomasuj wybrany opuszek palca.
- Mocno dociśnij lancet do zdezynfekowanego opuszka, tak aby znajdował się w bezpośrednim kontakcie ze skórą.
- Naciśnij przycisk wysuwający lancet. Końcówka nakłuwacza schowa się automatycznie, zapewniając bezpieczeństwo po jego użyciu.

- Delikatnie przyciśnij nakłuty opuszek palca, aby uzyskać kroplę krwi.
- Nie uciskając wybruszenia pipety, za które trzymasz, zbliż jej końcówkę do kropli krwi. Krew migruje przez kapilarę aż do linii wyznaczonej na pipecie.
- Jeżeli linia na pipecie nie została osiągnięta, pomasuj palec, aby uzyskać kolejną kroplę krwi.
- W miarę możliwości należy unikać wciągania do pipety pęcherzyków powietrza.
- Przenieś pobraną krew do dołka próbkowego płytki testowej poprzez ściśnięcie końcówki pipety. Poczekaj aż cała pobrana próbka krwi znajdzie się w dołku próbkowym.
- Odkręć niebieską nakrętkę butelki (biała nakrętka zostaje dokładnie przykręcona), a następnie dodaj 4-5 kropli diluentu do dołka próbkowego.
- Odczytaj wynik testu po 10 minutach.

Ważne wskazówki

- Test powinien być wykonany po upływie minimum 2 tygodni od potencjalnego zakażenia.
- Nie interpretuj wyniku testu po 15 minutach od jego wykonania.
- Przed wykonaniem testu zapoznaj się z ulotką załączoną do opakowania.
- Wynik testu jest wiarygodny, jedynie wtedy, gdy instrukcja jest ściśle przestrzegana.
- Przechowuj w temperaturze 4-30°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie zamrażaj.

Producent

VedaLab
Rue de l'Expansion
61000 Cerise, Francja