

LabHome Tik'Alert, test na boreliozę z krwi do wykrywania przeciwciał IgM anti-Borrelia w przypadku ukąszenia kleszcza, 1 sztuka

Cena: 52,82 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LABHOME
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tik'Alert to szybki test immunodiagnostyczny do wykrywania przeciwciał IgM przeciwko bakterii *Borrelia*, który umożliwia wczesne wykrycie infekcji już po 6 tygodniach od ukąszenia kleszcza.

Test domowego użytku pozwala na identyfikację przeciwciał IgM przeciwko *Borrelia*, co jest szczególnie istotne w początkowej fazie boreliozy, kiedy leczenie jest najbardziej skuteczne. Przeciwciała IgM mogą pozostawać w organizmie przez kilka miesięcy po ukąszeniu przez zakażonego kleszcza, komara, wszy lub innego owada przenoszącego bakterie *Borrelia burgdorferi*.

Zaleca się wykonanie testu co najmniej 2 tygodnie po ukąszeniu kleszcza, ponieważ tyle czasu jest potrzebne organizmowi do produkcji przeciwciał. Test jest prosty w użyciu: wymaga pobrania krwi z palca i dostarcza wynik w ciągu 10 minut. Dzięki wysokiej wiarygodności testu możliwe jest szybkie rozpoznanie infekcji i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia antybiotykami.

Zastosowanie

- Wykrywanie przeciwciał przeciwko *Borrelia* w klasie IgM we wczesnej diagnostyce boreliozy, po ukąszeniu przez kleszcza.
- Badanie profilaktycznie, szczególnie po okresie letnim, kiedy żerowanie kleszczy jest wzmożone, po ukąszeniu kleszcza (należy pamiętać, że nawet najmniejsze osobniki mogą być nosicielami boreliozy), przy wczesnych objawach zakażenia, w tym objawach grypopodobnych, takich jak gorączka, dreszcze, bóle stawowe.

Sposób użycia

- Umyj ręce mydłem i opłucz pod bieżącą wodą.
- Rozerwij aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi, a następnie wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę (wyrzuć torebkę z pochłaniaczem wilgoci).

- Dociśnij mocno mały pomarańczowy element, aż usłyszysz kliknięcie wskazujące, że urządzenie jest aktywowane.
- Zdejmij pomarańczowy element, obracając go w prawo lub w lewo
- Zdezynfekuj opuszek środkowego lub wskazującego palca dłoni.
- Aby zwiększyć ukrwienie, pomasuj wybrany opuszek palca.
- Mocno dociśnij lancet do zdezynfekowanej części opuszka, tak aby znajdował się w bezpośrednim kontakcie ze skórą.
- Naciśnij przycisk wysuwający lancet (końcówka nakłuwacza schowa się automatycznie, zapewniając bezpieczeństwo po jego użyciu).
- Delikatnie masuj nakłuty opuszek palca, aby uzyskać krople krwi.
- Nie uciskając pipety, zbliż jej końcówkę do kropli krwi (krew migruje przez kapilarę aż do linii wyznaczonej na pipecie).
- Za pomocą masażu możesz uzyskać kolejną kroplę krwi, jeżeli linia na pipecie nie została osiągnięta.
- W miarę możliwości należy unikać wciągania do pipety pęcherzyków powietrza.
- Przenieś pobraną krew do dołka próbkowego płytki testowej poprzez ściśnięcie końcówki pipety (poczekaj aż cała pobrana próbka krwi znajdzie się w dołku próbkowym).
- Odkręć niebieską nakrętkę (biała nakrętka zostaje dokładnie przykręcona), a następnie dodaj 4-5 kropli diluentu do dołka próbkowego.
- Odczytaj wynik testu po 10 minutach (nie interpretuj wyniku testu po 15 minutach).

Wynik negatywny:

- widoczna jest tylko jedna linia w obszarze kontrolnym (C),
- oznacza, że w próbce krwi nie wykryto przeciwciał przeciwko bakterii *Borrelia*.

Wynik pozytywny:

- widoczne dwie zabarwione linie pojawiające się w obszarze testowym (T) oraz w obszarze kontrolnym (C),
- intensywność linii obszaru testowego (T) może być mniejsza niż intensywność kontroli,
- oznacza, że w krwi są obecne przeciwciała IgM skierowane przeciw bakterii *Borrelia*,
- wskazuje to na możliwość rozwoju infekcji,
- należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Wynik nieważny:

- w okienku wyniku nie pojawi się żadna barwna linia lub pojawi się tylko jedna linia w obszarze testowym (T), przy braku linii w obszarze kontrolnym (C),
- w tym przypadku zaleca się powtórzenie badania z wykorzystaniem nowego testu TIK'ALERT® oraz świeżej próbki krwi.

Ważne wskazówki

- Wyrób medyczny do samokontroli – przed wykonaniem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
- Przechowywać w temperaturze 4-30°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie zamrażać.

Producent

VEDA.LAB
Rue de l'Expansion
61000 Cerise, France